

Produto: Medix Brasil - Luva para procedimento não cirúrgico de Nitrilo, sem pó

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE:

## Ficha Técnica

<p><b>IMAGEM DO PRODUTO</b></p>	
<p><b>DESCRIÇÃO</b></p>	<p>As Luvas de Nitrilo Medix Brasil, sem pó, foram desenvolvidas para a proteção dos pacientes e dos profissionais da saúde, em procedimentos não cirúrgicos.</p>
<p><b>INDICAÇÃO DE USO</b></p>	<p>As Luvas de procedimento não cirúrgico Medix Brasil 100% Nitrilo, sem pó, foram desenvolvidas para proteção de pacientes e profissionais de saúde para proteção individual, nos casos de contato com sangue e líquidos corporais, contato com mucosas e pele não íntegra de pacientes, reduzir a possibilidade de transmissão de micro-organismos de um paciente para outro nas situações de precaução de contato, prevenir a contaminação cruzada onde haja risco de contaminação por patógenos, promovendo uma barreira passiva contra agentes biológicos em procedimentos não cirúrgicos realizados em hospitais, clínicas e consultórios médicos e odontológicos, campanhas de saúde realizadas pelo poder público, laboratório de anatomia patológica, citológica ou de análises clínicas.</p>
<p><b>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</b></p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Fabricada em borracha sintética (Nitrilo)</li> <li>✓ Não estéril</li> <li>✓ Sem pó</li> <li>✓ Ambidestra</li> <li>✓ Texturizada</li> <li>✓ Punho com bainha</li> <li>✓ Espessura mínima: 0,08mm</li> <li>✓ Cores: Azul, Azul Violeta, Preta, Rosa</li> <li>✓ Disponível nos tamanhos: PP/ P/ M/ G/ GG</li> <li>✓ Comprimento: ≥220mm (PP, P) / ≥230mm (M, G, GG)</li> <li>✓ Validade 3 anos</li> <li>✓ Descartável e de uso único</li> </ul>
<p><b>APRESENTAÇÃO</b></p>	<p>Embalagem principal: cartucho de papelão contendo 100 unidades. Embalagem de transporte: caixa de papelão contendo 10 cartuchos.</p>
<p><b>ORIENTAÇÕES DE USO</b></p>	<p>Seguir o protocolo para a prática de higiene das mãos em serviços de saúde antes de calçar as luvas. Não usar anéis, pulseiras, relógio ou qualquer outro acessório que possa rasgar ou perfurar as luvas. Verificar o tamanho adequado, conforme indicação na embalagem, para</p>

	<p>evitar acidentes. Após o uso, retirar as luvas da forma correta, e descartá-las.</p>
<p><b>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</b></p>	<p><i>“PRODUTO DE USO ÚNICO”; “DESTRUIR APÓS O USO”; “PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; “PROIBIDO REPROCESSAR”; “NÃO ESTÉRIL”</i> <b>Ler atentamente as Instruções de Uso;</b> Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Descartar e não usar luvas previamente abertas ou danificadas; Após higiene das mãos calçar as luvas com as mãos secas; Caso ocorra irritação, o uso deverá ser descontinuado. Persistindo os sintomas, consulte um médico; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>
<p><b>ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE</b></p>	<p>As Luvas de procedimento não cirúrgico Medix Brasil de Nitrilo, sem pó, devem ser armazenadas em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>
<p><b>PORTARIAS ATENDIDAS</b></p>	<p>NBR ISO 11193-1: 2015 – Luvas para exame médico de uso único – Parte 1: Especificação para luvas produzidas de látex de borracha ou solução de borracha; Portaria Inmetro nº 332/2012; Portaria Inmetro nº 194/2018; Portaria NR6 (MTE); RDC ANVISA nº 55 DE 04/11/2011; RDC ANVISA nº 94 DE 27/07/2016; Portaria MTE nº 452 de 20/11/2014.</p>

**Importador:**

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.  
CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70  
Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil  
Fone: +55 (45) 3039-4242  
SAC 0800 006 3036 [sac@medixbrasil.com.br](mailto:sac@medixbrasil.com.br)

**Responsabilidade Técnica:**

Eduarda Zampieri Bordini  
CRF-PR Nº 25368  
Louise Marine Wittlich Succo  
CRF-PR Nº 34371

**Redes Sociais:**

[www.medixbrasil.com.br](http://www.medixbrasil.com.br)

