


Produto: Medix Brasil – Avental Descartável

Registro ANVISA:

Certificado de Aprovação (CA) MTE: isento, não considerado EPI.

Ficha Técnica

<p>IMAGEM DO PRODUTO</p>	
<p>DESCRIÇÃO</p>	<p>Avental descartável Medix Brasil, manga longa, punho com elástico, fechamento com tiras, tamanho único</p>
<p>INDICAÇÃO DE USO</p>	<p>O Avental Descartável Medix Brasil é indicado para higiene e proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos clínicos, laboratoriais, gastronômicos, hospitalares, odontológicos, Farmacêuticos, Estéticos, Industriais, Químicos e Têxtil. Roupas privativas para procedimento não cirúrgico utilizado por profissionais de saúde, pacientes e demais profissionais.</p>
<p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS</p>	<ul style="list-style-type: none"> ✓ Fabricado em: tecido não tecido (TNT) 100% de polipropileno do tipo agulhado, fechado com costuras overlock em todo o perímetro, com mangas longas que possuem terminação nos punhos com elástico. ✓ Não estéril ✓ Não impermeável ✓ Cor: Branca / azul / verde ✓ Modelo: fechamento em tiras, manga longa, punho elástico ✓ Tamanho: Único ✓ Dimensões: 130±5cm largura e 100±5cm comprimento aproximadamente ✓ Gramaturas: <ul style="list-style-type: none"> - 30g/m² - 35g/m² - 40g/m² - 50g/m² ✓ Descartável e de uso único ✓ Atóxico, Apirogênico, hipoalergênico ✓ Validade 5 anos
<p>APRESENTAÇÃO</p>	<p>Embalagem principal: pacote plástico contendo 10 unidades. Embalagem de transporte: caixa box (papelão) contendo 10 pacotes, 100 unidades / caixa box (papelão) contendo 20 pacotes, 200 unidades.</p>
<p>ORIENTAÇÕES DE USO</p>	<p>Colocar o produto ajustando na região do dorso para proteção contra possíveis contaminações durante a realização de procedimentos.</p>
<p>PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS</p>	<p>“PRODUTO DE USO ÚNICO; DESTRUIR APÓS O USO; PROIBIDO REPROCESSAR; NÃO ESTÉRIL; PROTEJA ESTE PRODUTO DO CALOR, UMIDADE E DA LUZ”; Ler atentamente as Instruções de Uso; Vestir o avental com as mãos limpas e secas Produto de utilização única; Destruir imediatamente após utilização única; Não estéril.</p>

Medix

BRASIL

	<p>Certificar-se de que o produto está bem ajustado ao corpo. Não proceder da utilização sem antes verificar a inviolabilidade da embalagem; Manter o produto em local limpo e seco e ao abrigo da ação da luz solar; Não colocar sob peso ou volumes, pois os mesmos poderão trazer danos as suas características técnicas e comprometer sua integridade;</p>
ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE	<p>O Avental Descartável Medix Brasil, devem ser armazenados em ambientes secos e arejados, sem exposição direta ao sol, temperatura não superior a 40°C. O armazenamento deve permitir a livre circulação de pessoas e equipamentos, e deve obedecer ao empilhamento máximo de 10 caixas de transporte. Os mesmos cuidados são válidos para o transporte, que deve garantir que os produtos cheguem a seu destino em perfeitas condições, evitando a exposição dos produtos ao calor excessivo, e evitando a exposição dos mesmos diretamente ao sol ou à chuva. A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem íntegras, dentro do prazo estabelecido na rotulagem do produto. Para que isso aconteça, devem ser tomados todos os cuidados necessários durante a armazenagem e transporte.</p>

Importador:

Medix Brasil Produtos Hospitalares e Odontológicos LTDA.

CNPJ: 10.268.780/0001-09 - I.E. 90451144-70

Rua Paraná, 1791 – Centro – 85.812-010 – Cascavel/Paraná – Brasil

Fone: +55 (45) 3039-4242

SAC 0800 006 3036 sac@medixbrasil.com.br

Responsabilidade Técnica:

Eduarda Zampieri Bordini

CRF-PR Nº 25368

Louise Marine Wittlich Succo

CRF-PR Nº 34371

Redes Sociais:

www.medixbrasil.com.br

