

**NOME DO PRODUTO: CATETER EPIDURAL – PORTEX**

Registro MS: 80228990108

**DADOS PRODUTO REGISTRO ANVISA**

Nome técnico: Cateter

Matéria Prima: Cateter em Nylon e conector em Polietileno

Método de Esterilização: **Óxido de Etileno**

Produto Estéril: ( X ) Sim ( ) Não

Validade: 5 anos

**USO ÚNICO**

**DESCRIÇÃO DO PRODUTO**

Cateter Epidural para infusão contínua e ou intermitente. Como parte integrante da gama de produtos para tratamento da dor, PORTEX é sinônimo de alta qualidade.

**INDICAÇÃO DE USO**

O produto é utilizado tanto para analgesia contínua de curta como de longa duração.

**INSTRUÇÃO DE USO**

- Após a punção com a Agulha Peridural, introduzir o cateter o quanto necessário;
- Retire a Agulha Peridural;

- Introduza a outra ponta do cateter ao conector Luer Lock e pressione até ouvir um “click”.

### ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

Cateter de nylon transparente, fechado na ponta, 3 olhos laterais:

\* 19G com 1,03mm de diâmetro externo e 0,55 diâmetro interno, priming de 0,25ml para **agulha 16G**;

\* 20G com 0,83mm de diâmetro externo e 0,45mm de diâmetro interno, priming de 0,19ml para **agulha 18G**.

Ambos com 915mm de comprimento, marcas de 50 a 150 mm x 10 mm e em 200 mm a partir da ponta.

Cateter epidural graduado, com conector de cateter com fecho em clip Luer lock, um guia para o cateter e o rótulo para identificação do cateter.



\* Produto isento de Látex

### APRESENTAÇÃO COMERCIAL

CÓDIGO	DESCRIÇÃO
100.382.116	Cateter Epidural 19G para Agulha 16G
100.382.118	Cateter Epidural 20G para Agulha 18G

**FORMA DE APRESENTAÇÃO EMBALAGEM**

Embalado individualmente em Papel Grau Cirúrgico e Filme de Poliéster e Polietileno.

Caixa com 10 unidades.

**CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO**

Armazenar em local seco e limpo, em temperatura máxima de estocagem de 40°C.

**PRECAUÇÕES/ CONTRAINDICAÇÕES**

Retirar assepticamente de sua embalagem original, em ambiente estéril.

Não deve ser reutilizada ou reesterilizada.

Pode permanecer até 30 dias ou de acordo com o protocolo da Instituição.

Descartar após o uso conforme protocolo da instituição.

**Importado e Distribuído por:**

Cirúrgica Fernandes Ltda

Al. África, 570, Santana de Parnaíba – SP

CNPJ: 61.418.042.0001/31 SAC 0800-771647

Site: [www.cfernandes.com.br](http://www.cfernandes.com.br)

Resp. Téc. Enfa. Lucia A. Higa – Coren SP 069259