



Ficha Técnica

Equipo descartável- GLOMED

REG. Nº.: 204
 RESPONSÁVEL TÉCNICA:
 SIMARA COLOMBI BUSCH
 COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: EQUIPO PARA ADMINISTRAÇÃO GRAVITACIONAL DE SOLUÇÕES E /OU MEDICAMENTOS PARENTERAIS.

NOME COMERCIAL: EQUIPO DESCARTÁVEL - GLOMED

REGISTRO ANVISA: 80273450018

CERTIFICADO DE CONFORMIDADE – UL-BR INMETRO

IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR:

OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12

Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central

Blumenau – SC – Brasil

CEP 89069-101

SAC 0800-645-2480



RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

ANHUI EASYWAY MEDICAL SUPPLIES CO. LTD.

No. 8 Tianfeng Road, Yongfeng Industry Area, Tianchang City, Anhui, China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

Respiro de ar com filtro bacteriológico 0,2µ (Modelo GL-C/S e GL-C/L);

Câmara Gotejadora Flexível Macrogotas (20 gotas = 1ml) – (50 milímetros comprimento da câmara)

Filtro de Partículas 15µ;

Tubo flexível em PVC, 150 cm, transparente;

PRODUTO	COD. INTERNO	PESO		LARG		ALT		COMP		CX DE TRANSPORTE	
		PLAS	PGC	PLAS	PGC	PLAS	PGC	PLAS	PGC	PLAS	PGC
Equipo simples Luer Lock	GL-S/L	13,2	10,7	0,39	0,37	0,33	0,28	0,66	0,62	500	400
Equipo simples Luer Slip	GL-S/S	12,9	10,3	0,39	0,37	0,33	0,28	0,66	0,62	500	400
Equipo Intermediário Luer Lock	GL-I/L	10,1	10,7	0,37	0,39	0,29	0,33	0,64	0,66	400	
Equipo Intermediário Luer Slip	GL-I/S	9,9	10,3	0,37	0,39	0,29	0,33	0,64	0,66	400	
Equipo completo Luer Lock	GL-C/L	10,1	10,7	0,37	0,39	0,29	0,33	0,64	0,66	400	
Equipo completo Luer Slip	GL-C/S	9,9	10,3	0,37	0,39	0,29	0,33	0,64	0,66	400	
Equipo Slip Sem Injetor Lateral	GL-S/S	12,0		0,39		0,33		0,66		500	

CÓDIGO DE BARRAS:

MODELO	CODIGO DE BARRAS CX. EMBARQUE		CODIGO DE BARRAS CX. EMBALAGEM UNITARIA	
	EMBALAGEM PLASTICA	EMBALAGEM PGC	EMBALAGEM PLASTICA	EMBALAGEM PGC
EQUIPO CONEXÃO LUER LOCK	0606529140168	0606529140175	0606529140120	0606529140137
EQUIPO CONEXÃO LUER SLIP	0606529140182	0606529140199	0606529140144	0606529140151
EQUIPO SIMPLES LUER SLIP	0602883920385	X	0602883920378	X

ESPECIFICAÇÕES E CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO PRODUTO:

Modelo	Ponta perfurante com tampa	Respiro de ar com filtro bacteriológico	Câmara gotejadora	Filtro de partículas	Tubo flexível PVC	Pinça rolete	Injetor lateral em Y	Conector
GL-S/L	Presente	Ausente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Ausente	Luer Lock
GL-S/S	Presente	Ausente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Ausente	Luer Slip
GL-I/L	Presente	Ausente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Autocicatrizante	Luer Lock
GL-I/S	Presente	Ausente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Autocicatrizante	Luer Slip
GL-C/L	Presente	Presente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Autocicatrizante	Luer Lock
GL-C/S	Presente	Presente	Macrogotas	15µ	Presente	Presente	Autocicatrizante	Luer Slip

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicado para administração gravitacional de medicamentos e soluções parenterais, tendo como finalidade infundir o dispositivo venoso periférico ao recipiente de infusão.

EMBALAGEM /ESTERILIZAÇÃO:

Embalado individualmente com papel grau cirúrgico e filme plástico transparente e/ ou embalagem plástica, abertura asséptica, rotulagem conforme RDC 185/2001;
 Caixa de transporte com 500 unidades;

ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO, VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Feche a pinça rolete;
- Remova a tampa protetora da ponta perfurante e conecte ao frasco de solução;
- Suspenda o frasco no suporte e preencha a câmara de gotejamento (Importante preencher ± 30 % de sua capacidade);
- Abra a pinça rolete, até que a solução preencha o tubo flexível;
- Feche a pinça rolete e retire a tampa protetora do conector, em seguida encaixe ao dispositivo de infusão (agulha, cateter, escalpe entre outros).
- Abra a pinça rolete e regule o fluxo de gotejamento conforme prescrição médica.



Ficha Técnica

Equipo descartável- GLOMED

REG. Nº.: 204
RESPONSÁVEL TÉCNICA:
SIMARA COLOMBI BUSCH
COREN/SC 273.138

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- Produto destinado a uso médico hospitalar;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação
- Usar o produto imediatamente após a abertura da embalagem;
- Manipular com os cuidados necessários para evitar contaminação;
- Produto de uso único, não reesterilize nem reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente;
- Atóxico, Livre de Látex.


CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.
O produto deve ser transportado em sua embalagem original.


NORMA APLICADA: ABNT NBR ISO 8536-4:2008; Portaria nº 502 de 29 de Dezembro de 2011 INMETRO

MODELOS:


EQUIPO MACROGOTAS - SIMPLES
Modelo: **GL-S/S** e **GL-S/L**

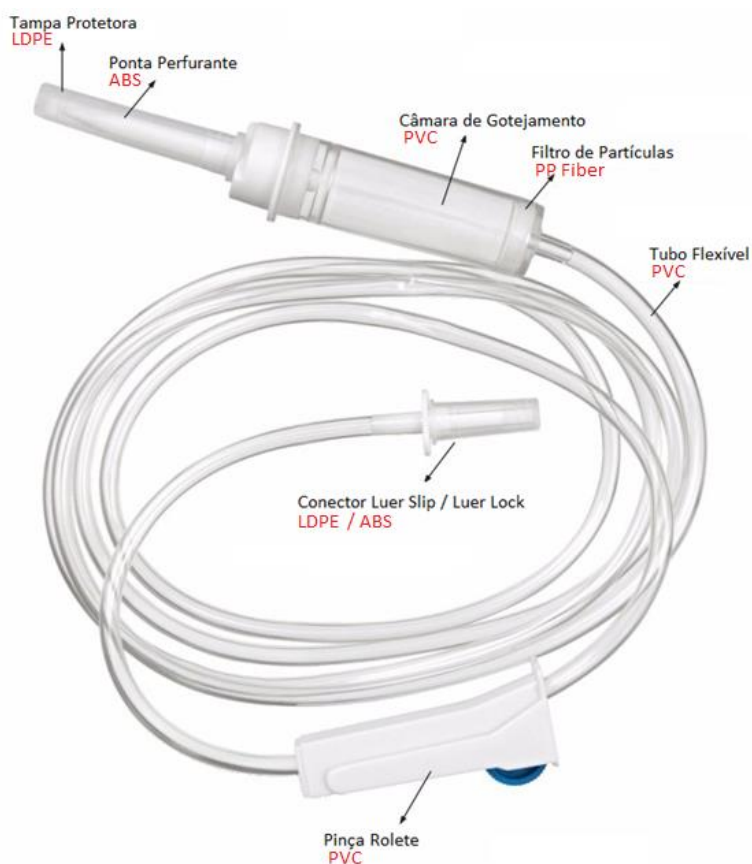

EQUIPO MACROGOTAS – INTERMEDIÁRIO
Modelo: **GL-I/S** e **GL-I/L**

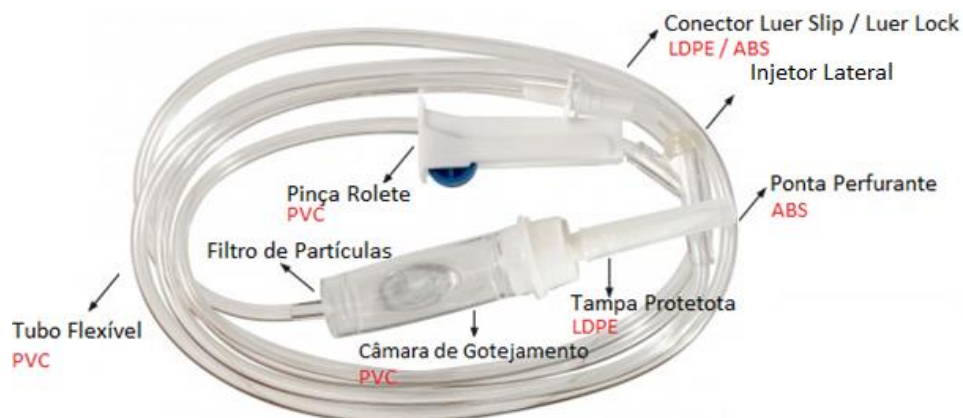

EQUIPO MACROGOTAS - COMPLETO
Modelo: GL-C/S e GL-C/L

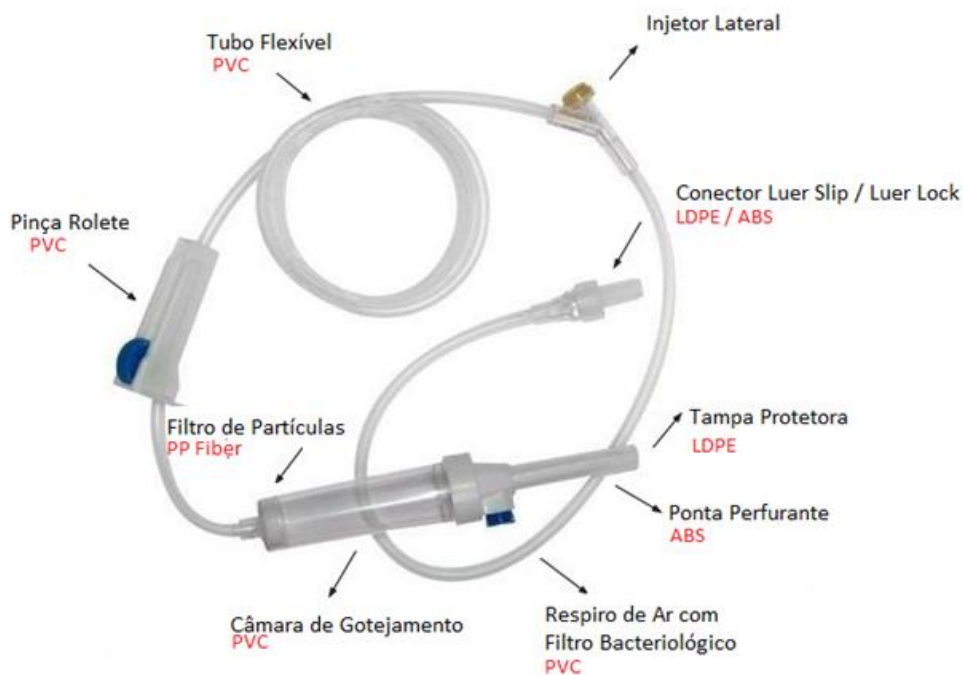

Simara Colombi
Enfermeira
COREN/SC 273.138

SIMARA COLOMBI BUSCH
RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138