

Ficha Técnica

Luva Cirúrgica Estéril com pó BC 10

Luva cirúrgica de látex natural, anatômica, estéril, com pó, série BC 10

Anvisa nº 80808480002 – CA 35189



Introdução:

A BeCare valoriza os profissionais de saúde e entende que os cuidados assistenciais envolvem, não só ações biológicas, compreendemos a assistência em saúde como prática humanizada. Compondo uma linha de cuidados assistenciais, desenvolvemos produtos que atendam a demanda de nossos clientes, de modo a construir um espaço concreto nas instituições de saúde. Pensando na segurança, qualidade e praticidade de seus clientes, desenvolvemos uma linha de luvas de látex, que funcionam como barreira, atuando no controle da disseminação de microrganismos.

Aplicação:

Instituições de saúde adotam o uso de luvas como parte da rotina assistencial, seja para procedimentos invasivos ou não invasivos. As Luvas Cirúrgicas Estéreis com pó BC 10, são destinadas à procedimentos cirúrgicos ou manipulações que exijam esterilidade e assepsia do profissional assistente.

Benefícios:

- As Luvas Cirúrgicas Estéreis BC 10 possuem controle de qualidade extremamente rigoroso;
- Ótima sensibilidade Tátil e Proteção;
- Embaladas individualmente em papel grau cirúrgico;

- Formato anatômico;
- Disponível em vários tamanhos;
- Aprovada pelo Ministério do Trabalho;
- Certificado de Conformidade Inmetro;

Orientações de Uso:

Desenvolvida para manipulação em procedimentos estéreis e/ou invasivos.

Características do Produto:

As Luvas Cirúrgicas Estéreis com pó BC 10, são desenvolvidas em látex natural, possuem comprimento de 290 mm e uma espessura média de 0.21 mm, lubrificadas com pó bioabsorvível, que facilita a introdução das mãos, seu punho possui bainha enrolada que permite melhor calçamento e retirada da luva. Produto esterilizado por radiação Gama. Embalado individualmente em papel grau cirúrgico; Caixa master com 500 pares.

Instruções de uso:

1. Retirar adornos - anéis, relógio, pulseiras;
2. Escolher a luva compatível ao tamanho da sua mão;
3. Após, realizar a lavagem correta das mãos;
4. Abra a embalagem externa das luvas, ou peça para alguém abrir e expor o embrulho para você ou deixa-lo sobre superfície plana, sem contaminar o pacote;
5. Abra o embrulho em uma superfície limpa e em uma altura confortável para sua manipulação, em seguida, tocando apenas na face externa do embrulho, abra ambas as dobras para os lados, expondo as luvas;
6. As luvas estão dispostas corretamente a sua frente, onde a luva da mão direita está a sua direita e a luva da mão esquerda a sua esquerda;
7. Com sua mão não dominante, retire a primeira luva do pacote, pegando-a pela dobra do punho. Levante – a longe do corpo, manter a palma da mão voltada para cima, neste momento, introduza os dedos da mão dominante, calmamente, procurando ajustar os dedos internamente e com cuidado para não contaminar a parte estéril;
8. Não se preocupe se os dedos ficarem mal posicionados, continue o procedimento, você poderá ajustá-los quando estiver com as luvas colocadas em ambas as mãos;
9. Retirar a segunda luva do pacote colocando três dedos da primeira mão, já enluvada, por dentro da dobra do punho da segunda luva. Levante - a longe do corpo, com a palma da mão voltada para cima e introduza os dedos da segunda mão;
10. Ajustar os dedos externamente de ambas as mãos já enluvadas;
11. Se ocorrer contaminação em qualquer momento, descartar as luvas e começar de novo com luvas novas;
12. Mantenha as mãos voltadas para cima, sem encostar-se em nada;

13. Após o uso, retire a luva de uma das mãos puxando-a externamente sobre a mão, virando-a pelo avesso. Com a outra mão enluvada, segure a luva que foi retirada, e pela parte interna da luva que ainda está na mão, puxe-a externamente, virando pelo avesso.

Composição:

Látex natural, pó bioabsorvível e inerte.

Informações Adicionais:

- Produto contém látex de borracha natural, seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis ao látex;
- Em casos de irritação, descontinuar o uso e procure orientação médica;
- Manter o produto em ambiente limpo, seco e arejado;
- Proteger da umidade e da luz solar direta;
- Prazo de validade, quando embalagem preservada, é de 5 anos;
- Uso único;
- Descartar conforme regras sanitárias vigente;
- Proibido reprocessar;
- Estéril
- Apirogênico;
- Atóxico.

Tamanhos disponíveis:

Comercializada nos tamanhos

- ✓ 6.5
- ✓ 7.0
- ✓ 7.5
- ✓ 8.0
- ✓ 8.5



V. 09/2020