

 ERS	INSTRUÇÃO DE USO	001
REGISTRO ANVISA	81400090001	
FAMÍLIA	ALGODÃO HIDRÓFILO: BOLA 50g, 100g; CAIXA 25g, 50g E 100g, DISCO 25g, 50g E 100g; MULTIUSO 25g, 50g 100g; QUADRADINHO PRENSADO 25g, 50g, 100g; ROLO 25g, 50g, 100g, 250g, 500g.	

FABRICANTE: ERS INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE HIGIENE E LIMPEZA S/A
 CNPJ 21.172.673.0001/07
 Endereço: Av. Governador Nilo Coelho, lote 6, Qd B, Distrito Industrial, Abreu e Lima/PE CEP 53520-810

DESCRIÇÃO: O Algodão hidrófilo Nathy é composto 100% de algodão alvejado, cardado, macio e altamente absorvente.
 Não Estéril.
 Uso único

ARMAZENAGEM: O algodão Nathy deve ser armazenado em local apropriado, ao abrigo da luz solar, em local limpo e seco, separado de produtos úmidos ou líquidos.

APLICAÇÃO: para uso hospitalar, odontológico ou na higienização da pele, em curativos, na absorção de líquidos e secreções (desde que esteja envolvido em gaze). Produto não estéril, caso necessário recomenda-se, esterilizar em autoclave a vapor, óxido de etileno ou raio gama.

RESPONSÁVEL TÉCNICO:
 Maria Augusta de Lucena – Química responsável, CRQ 01201379

NUMERO DO REGISTRO ANVISA:
 81400090001

COMPOSIÇÃO: Composto 100 % de algodão alvejado e cardado.
 HIDROFILIDADE: >30 segundos
 Ph: 5,0 à 8,0
 Absorção: < 2.400%
 Impurezas: >30

VIDA ÚTIL: 5 anos, quando armazenado conforme especificado.

MODO DE USAR:

Para absorção de líquidos, coletar quantidade de algodão suficiente e colocar na área desejada.

Para antissepsia e limpeza da pele em geral, coletar quantidade de algodão suficiente e passar na área desejada.

ELABORAÇÃO DEPARTAMENTO TÉCNICO	APROVAÇÃO DEPARTAMENTO DA QUALIDADE
--	--