

Referência do Produto - RP-26011
Registro de Produto no MS: 80305560040

O Conector valvulado **TRO SOLUSET BR MISC CONECTOR VALVULADO PLUS - MC** é um dispositivo para adaptação em dispositivos intravenosos de infusão para retenção e adição de medicamentos. Tem em seu interior uma válvula em silicone. Quando a válvula está na posição fechada, apresenta uma extremidade de superfície plana, lisa. Quando um conector macho é inserido na válvula, o pistão elastomérico dentro da válvula é comprimido, permitindo a abertura e permitindo o fluido atravessar de forma retilínea sem acúmulo de resíduos. Assim que o conector macho é removido, a seção abaixo do pistão fornece uma força de mola para retornar o pistão para uma posição fechada. Seu sistema Septo em self-opening (SOSS) garante a integridade do septo contra abrasões, mantendo a válvula de silicone totalmente fechada durante todo o uso. É um produto estéril, isento de látex e de metal, livre de pirogênico e de uso único. É compatível com sangue, lipídeos e quimioterápicos. Não hemolítico. Tem capacidade de utilização de **até 7 dias** em CVCs e PICCs. Seu sistema fechado impede o uso de agulha. Com **fluxo de 5l/h**

Composição:

- 1 - Válvula em silicone com sistema Septo em self-opening, com condúite interno para a passagem de fluido de forma retilínea sem acúmulo de resíduos e com projeto de vedação dupla (Septo SOSS + diafragma)
- 2 - Dispositivo microbiologicamente e mecanicamente valvulado em material transparente.
- 3 - Conexão luer lock e luer slip.
- 4 - Tampa protetora para manter a esterilidade do produto até o momento do uso.

- ❖ **Priming de 0,01ml.**
- ❖ **Pressão Neutra**

Conector valvulado **TRO SOLUSET BR MISC CONECTOR VALVULADO PLUS - MC** é estéril e para uso único. A esterilização é feita por óxido de etileno. A validade é de 3 anos.

O Conector valvulado **TRO SOLUSET BR MISC CONECTOR VALVULADO PLUS - MC** está de acordo com as normas ISO 594 - 1 e 2 para produtos médicos classe II e é devidamente registrado na ANVISA.

Cada conector valvulado **TRO SOLUSET BR MISC CONECTOR VALVULADO PLUS - MC** é embalado em uma embalagem tipo blister formada por uma bolsa plástica dupla de polietileno, grau médico, e papel grau cirúrgico. Esta embalagem é então colocada dentro de uma caixa de papelão, onde são colocadas 150 peças.

