



ADVANTIVE SONDA DE FOLLEY EM LATÉX

REGISTRO ANVISA 10296900144

INSTRUÇÕES DE USO

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

A partir das técnicas de sondagem atualmente aceitas, proceda com assepsia da região genital e uretral;

Abra a embalagem de forma asséptica;

Lubrifique a ponta da sonda com anestésico estéril;

Introduza a sonda através da uretra até perceber o refluxo de urina;

Insufle o balonete;

Fixe a sonda conforme técnica aceita e conecte-a um sistema de drenagem;

Para retirada desinsufle o balonete e retire a sonda.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo médico hospitalar - uso único

Produto estéril – Esterilizado a Oxido de Etileno

A embalagem deve ser aberta somente no momento da sua utilização em condições assépticas.

Não utilizar caso a embalagem esteja aberta, violada, molhada, danificada ou fora do prazo de validade;

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados;

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

A sonda não deve ultrapassar 29 dias de uso, sendo o tempo máximo permitido, 14 dias é o período ideal de utilização antes de sua substituição.



CONTRAINDICAÇÕES

Pacientes hipersensíveis ao látex não devem utilizar o produto, com risco de reação alérgica grave.

Contra indicado a paciente com trauma uretral;

Pacientes que apresentem sangramento no meato urinário;

Abcessos de próstata ou retal;

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

