



VITAL GOLD SCALP DESCARTÁVEL COM DISPOSITIVO DE SEGURANÇA

REGISTRO ANVISA 10296900048

INSTRUÇÕES DE USO

- 1- Inspecione visualmente o produto quanto à integridade da embalagem, anteriormente ao uso;
- 2- Escolher a via de acesso mais adequada, levando em consideração o tempo de infusão, idade, peso do paciente. Selecionar o calibre adequado a ação pretendida.
- 3- Caso o dispositivo seja utilizado para infusão, retirar o ar da conexão utilizando solução fisiológica através de equipo ou seringa.
- 4- Realizar o procedimento de assepsia e garroteamento do membro escolhido conforme técnica de enfermagem atualmente aceita.
- 5- Proceder a punção venosa com o bisel voltado para cima em um ângulo de 30º após transfixar a veia. Em seguida progredir a agulha paralelamente a pele.
- 6- Observar o refluxo de sangue e conectar a seringa ou equipo contendo a solução a ser infundida.
- 7- Fixar o escalpe de acordo com a técnica mais apropriada conforme o local puncionado.

Ativação do dispositivo de segurança

- 1- Ao finalizar a infusão, retirar o scalpe de forma cuidadosa para não lesionar o paciente e de modo que não haja risco de transfixação do acesso venoso.
- 2- Utilizando uma das mãos, pressione a veia que está sendo utilizada para que não haja interrupção do fluxo sanguíneo.
- 3- Com a outra mão, utilize o dedo indicador que servirá como base abaixo da borboleta do escalpe. Com o dedo polegar posicionado sobre o início do dispositivo de segurança, remova a agulha e ao mesmo tempo retire a agulha e progrida o dispositivo sobre a agulha até que o mesmo esteja totalmente travado.
- 4- Realizar o curativo segundo técnica padrão no local da punção.
- 5- Descartar o material imediatamente em local apropriado.



ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto estéril – Esterilizado a Oxido de Etileno

Destruir após a sua utilização.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.

O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Precauções são necessárias para evitar punções acidentais, que podem transmitir infecções graves;

O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento do uso.

O produto deve ser descartado em recipientes com paredes rígidas, inquebrável, boca larga e tampa;

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joamed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

