

Ficha Técnica Máscara Descartável OLIMED

REG. N°.: 209 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

NOME TÉCNICO: MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL - OLIMED

NOME COMERCIAL: MÁSCARA DESCARTÁVEL - OLIMED

REGISTRO ANVISA: 80273450010

Mescare Orace Novel Open and Novel Mescare Orace Novel Mescare Orace Novel Mescare Orace Novel Mescare Orace Novel

OOLIMED



IMPORTADOR E DISTRIBUIDOR: OLIMED MATERIAL HOSPITALAR S.A.

CNPJ: 03.033.589/0001-12 Rua Ricardo Georg, 1115 – Itoupava Central Blumenau – SC – Brasil CEP 89069-101 SAC 0800-645-2480

RESPONSÁVEL TÉCNICA:

SIMARA COLOMBI BUSCH - COREN/SC 273.138

FABRICANTE:

GRAND SHANGHAI INDUSTRIES CO.,LTD

Suite 202, No. 788 Xiupu Road, Kangqiao, New Pu Dong District, Shanghai, P:R. China

DESCRIÇÃO TÉCNICA:

A MÁSCARA CIRÚRGICA DESCARTÁVEL OLIMED é confeccionada em tecido não tecido 100% Polipropileno, possuindo a gramatura de 20g/m² em todas as suas camadas, sendo 2 camadas em TNT e 1 uma camada interna de FILTRO MELT BLOWN (com eficiência de filtragem BFE: ≥95%) totalizando três camadas. Apresenta clipe nasal ajustável totalmente revestido, atóxica, hipoalérgica. Disponível na cor **BRANCA, PRETA, ROSA.** Com opções em <u>Elástico</u> ou em <u>Tiras</u>.

PRODUTO	CX - PCT	COR	PESO	LARG	ALT	COMP	COD. DE BARRAS COMERCIAL	COD. DE BARRAS EMBARQUE
Mascara Tiras	CAIXA	BRANCA	12,3	0,39	0,56	0,52	0606529141202	0606529141219
Mascara Tiras	PACOTE	BRANCA	12,4	0,38	0,58	0,49	0606529141110	0606529141103
Mascara Elástico	CAIXA	BRANCA	7,2	0,38	0,30	0,52	0606529141196	0606529141189
Mascara Elástico	PACOTE	BRANCA	15,0	0,39	0,49	0,56	0606529141097	0606529141080
Mascara Elástico	CAIXA	ROSA	5,4	0,52	0,38	0,30	0602883920545	0602883920538
Mascara Elástico	CAIXA	PRETA	5,4	0,52	0,38	0,30	0602883920569	0602883920552

INDICAÇÃO, FINALIDADE, USO E APLICAÇÃO A QUE SE DESTINA O PRODUTO:

Indicada para a proteção do profissional da saúde contra as patologias de transmissão aérea e projeção de fluídos corpóreos que possam atingir as vias respiratórias.



Ficha Técnica Máscara Descartável OLIMED

REG. N°.: 209 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

EMBALAGEM:

MODELO	EMBALAGEM	QTDE POR EMBALAGEM	CAIXA TRANSPORTE
MÁSCARA COM TIRAS	PLÁSTICO	50 UNIDADES	80 PACOTES
MÁSCARA COM TIRAS	CAIXA	50 UNIDADES	60 CAIXAS
MÁSCARA COM ELÁSTICO	PLÁSTICO	50 UNIDADES	100 PACOTES
MÁSCARA COM ELÁSTICO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS
MÁSCARA COM ELÁSTICO ROSA/PRETO	CAIXA	50 UNIDADES	40 CAIXAS

VALIDADE DE 5 ANOS A PARTIR DA DATA DE FABRICAÇÃO.

ORIENTAÇÕES PARA O USO E APLICAÇÃO CORRETA DO PRODUTO:

- Abra a caixa/pacote e retire a máscara;
- Faça o manuseio pelas alças/tiras com as mãos higienizadas;
- Posicione as dobras para baixo no lado de fora da máscara e as dobras para cima para o lado de dentro da máscara;
- Certifique-se que a máscara esta rente ao rosto, cobrindo nariz e a boca;
- Prenda a máscara atrás das orelhas seja com elástico ou amarrando atrás da cabeça com as tiras;
- Ajuste o clipe nasal ao contorno do nariz;
- Evite tocar na parte da frente quando estiver colocando-a;
- Não usar por mais de 4horas, trocar sempre que estiver úmida;
- Para retirá-la, toque apenas nos elásticos ou nas tiras;
- Descarte em um local apropriado.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS E CUIDADOS ESPECIAIS:

- O uso deve ser individual;
- Evite tocar na máscara durante o uso, se tocar higienize suas mãos;
- Se precisar mexer ou ajustar a máscara, fazer pelo elástico ou amarração;
- Verifique a integridade da embalagem antes da sua utilização, não utilize se a mesma estiver violada, danificada ou molhada;
- Somente utilizar o produto se o mesmo estiver dentro do prazo de validade, desprezar o produto sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
- Produto de uso único, não reutilize, destrua após o uso;
- Armazenar em local seco, limpo e em temperatura ambiente
- Não é recomendado o uso da mesma máscara por mais de 4horas, trocar sempre que estiver úmida por outra limpa e seca;
- Descartar em local apropriado



Ficha Técnica Máscara Descartável OLIMED

REG. N°.: 209 RESPONSÁVEL TÉCNICA: SIMARA COLOMBI BUSCH COREN/SC 273.138

CUIDADOS NO ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso, evite calor e proteja o produto da luz do sol.

O produto deve ser transportado em sua embalagem original.

Simara Colombi Enfermeira COREN/SC 273.138

SIMARA COLOMBI BUSCH

RESPONSÁVEL TÉCNICA - COREN/SC 273.138