

DETERGENTE VIC

Código: FT 015

Revisão: 02

Emissão: Fevereiro/2019

DESCRIÇÃO

DETERGENTE VIC é um detergente neutro, concentrado, pronto uso, composto por tensoativos aniônicos. Uso para instrumental.

INDICAÇÕES

DETERGENTE VIC é destinado à limpeza de materiais de uso hospitalar e utensílios de cozinha hospitalar, pisos e paredes.

ADVERTÊNCIAS

Não ingerir. Evite a inalação ou a aspiração, contato com os olhos, contato com a pele. Após utilização do produto, lave e seque as mãos. Manter produto em sua embalagem original.

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos ou com a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão acidental, não provocar vômito e consultar imediatamente o centro de intoxicações ou serviços de saúde próximo. Em caso de inalação ou aspiração remova a pessoa para local arejado e se houver sinais de intoxicação chame por socorro médico.

INSTRUÇÕES DE USO

USO EXTERNO.

Aplicar DETERGENTE VIC puro para limpeza de materiais e utensílios hospitalares com maior sujidade. Pode-se usar o produto diluído em materiais ou utensílios de baixo grau de sujidade. Para diluição utilize a proporção de 20 ou 50 ml do produto para 1 litro de água. Após o uso, puro ou diluído, proceda enxágue com água.

IMPORTANTE: Verifique a compatibilidade do produto com as instruções de lavagem dos utensílios e materiais.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

DETERGENTE VIC

Código: FT 015

Revisão: 02

Emissão: Fevereiro/2019

APRESENTAÇÕES

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

“Não ingerir.”

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL.”

“PROIBIDO A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. ASSISTÊNCIA À SAÚDE.”

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

COMPOSIÇÃO

Componentes ativos: Ácido sulfônico e Lauril éter sulfato de sódio.

Excipientes: Conservante, sequestrante, espessantes, corretivo de pH e veículo.

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De amarelo claro a amarelo.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido límpido e homogêneo.

pH:..... 6,4 a 7,4.

Densidade:..... 1,015 a 1,035 g/ml.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

DETERGENTE VIC

Código: FT 015

Revisão: 02

Emissão: Fevereiro/2019

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Produto Saneante Notificado na ANVISA/MS Nº 25351.602345/2011-12.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br