

INSTRUÇÕES DE USO

Luva para procedimento não cirúrgicos – marca NUGARD

Nome técnico: Luva para procedimentos não cirúrgicos.

Nome comercial: Luva para procedimento não cirúrgicos de Látex – marca NUGARD

Conteúdo: 01 caixa contendo 100 unidades

Registro Anvisa nº: 80748910003

CA nº: 30.315

Distribuidor:

Kevenoll do Brasil Produtos Médicos Hospitalares Ltda

CNPJ: 12.936.659/0001-33

Rua Ricardo Georg, 1115

Blumenau – SC – Brasil

Responsável Técnico: Simara Colombi

COREN/SC 273.138

Fabricante:

Kevenoll S.A

Ruta 74, KM 25,5 – Suarez – Canelones – Uruguai

1 - Indicação, finalidade, uso e aplicação a que se destina o produto:

As Luva para procedimento não cirúrgicos de Látex – marca NUGARD, são utilizadas por profissionais em procedimentos gerais onde não haja a necessidade de uma luva esterilizada. Podem ser utilizadas também em procedimentos onde haja a necessidade de uma luva esterilizada, como, por exemplo, no caso de intervenções cirúrgicas, curativos em queimados, etc. Neste caso a luva deverá ser esterilizada no hospital através de óxido de etileno.

2 – Especificações e características técnicas do produto:

As Luva para procedimento não cirúrgicos de Látex – marca NUGARD não são estéreis, e atuam, reduzindo ou eliminando o risco de contaminação do usuário, funcionando como uma barreira mecânica a secreções sangüíneas e fluidos.

Ambas as apresentações são de punho médio e encontradas nos seguintes tamanhos: PP, P, M, G.

Composição:

Látex 100% natural.

3 - Orientações suficientes e adequadas para o uso ou aplicação correta e segura do produto:

Para uso correto do produto, primeiramente deve ser feita uma breve assepsia com lavagem das mãos e posterior secagem das mesmas para que em seguida as luvas sejam calçadas, antes das atividades pelos profissionais dos procedimentos indicados.

Instruções de Uso:

Abra a parte superior da embalagem;

Retire a luva da embalagem;

Coloque uma luva na mão esquerda e uma luva na mão direita.

4 - Precauções, restrições, advertências e cuidados especiais:

Contém látex natural;
Existem casos isolados de reações alérgicas ao látex;
Havendo irritação da pele, suspenda o uso do material e procure orientação médica;
Não utilizar se a embalagem estiver violada;
Produto de uso único - Nunca reutilizar a luva;
Destruir após o uso;
Produto não estéril;
Desprezar a luva sempre que houver dúvida quanto à contaminação;
Observe o tamanho da luva antes do uso para evitar que a mesma se rasgue;
Armazenar em local fresco, seco e à temperatura ambiente.

PROBLEMAS CAUSADOS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O PRODUTO

Defeito Percebido	Realidade na maioria dos casos
Alergia no uso	Hipersensibilidade às proteínas do látex (1% a 2% de população ou uso indevido de degermantes, lubrificantes ou detergentes).
Luva rasgando ao calçar	Uso de tamanho inadequado, uso de objetos cortantes ou perfurantes ao calçar, uso indevido da bainha (tensionamento em posição imprópria)
Amarelamento ou avermelhamento da luva	Exposição indevida ao calor ou à luz, contato com metais ou em usuários portadores de alto nível de ácido urico ou presença de cargas ácidas nas mãos.

5 – Eficácia e segurança do produto:

A eficácia e segurança do produto é garantida pelo controle exercido durante todo o processo da manufatura que inclui as seguintes fases:

Seleção de fornecedores qualificados e certificados para as matérias primas.

Seleção das matérias primas recebidas

Teste físicos e funcionais para verificação de conformidade do produto com os procedimentos escritos das especificações e limites a serem cumpridos durante todas as fases do processo de manufatura e produto acabado.

As luvas de procedimento são produtos de uso rotineiro em hospitais, clínicas e consultórios tornando-se um produto indispensável.



Simara Colombi
Enfermeira
COREN/SC 273.138

Responsável Técnico
Simara Colombi
COREN/SC 273.138