

A ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli informa que a instrução de uso a seguir se aplica para os seguintes modelos comerciais: EXT004020L, EXT004060L, EXT0040120L, EXT000020, EXT000020LR, EXT000060, EXT000060LMR, EXT000060LR, EXT0000120, EXT0000120LMR, EXT0000120LR, EXT0002520LR

EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL

Indicação de uso: Os extensores para infusão da ForteCare são indicados para infusão gravitacional de soluções parenterais.

Especificação:

Código interno	Descrição do Produto
EXT004020L	Extensor para infusão de 20 cm com 3 french com ponta distal luer lock
EXT004060L	Extensor para infusão de 60 cm com 3 french com ponta distal luer lock
EXT0040120L	Extensor para infusão de 120 cm com 3 french com ponta distal luer lock
EXT000020	Extensor para infusão de 20 cm com 9 french com ponta distal luer slip
EXT000020LR	Extensor para infusão de 20 cm com 9 french com ponta distal luer lock rotatório
EXT000060	Extensor para infusão de 60 cm com 9 french com ponta distal luer slip
EXT000060LMR	Extensor para infusão de 60 cm com 9 french com pontas distais luer lock rotatório
EXT000060LR	Extensor para infusão de 60 cm com 9 french com ponta distal luer lock rotatório
EXT0000120	Extensor para infusão de 120 cm com 9 french com ponta distal luer slip
EXT0000120LMR	Extensor para infusão de 120 cm com 9 french com pontas distais luer lock rotatório
EXT0000120LR	Extensor para infusão de 120 cm com 9 french com ponta distal luer lock rotatório
EXT0002520LR	Extensor para infusão de 520 cm com 9 french com luer lock rotatório e clamp corta fluxo

Produto estéril, apirogênico e atóxico. **Esterilizado a gás óxido de etileno.**

Instruções de uso:

1. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade e se a embalagem está íntegra.
2. Abrir a embalagem através de técnica asséptica.
3. Retirar as tampas protetoras e conectar uma extremidade no equipo e a outra no dispositivo de acesso ao paciente.
4. Verificar ausência de vazamentos.
5. Ao término da infusão, descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

▲ PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. DESTRUIR APÓS O USO.

- Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade.
- Use sempre técnica asséptica quando manusear o produto.
- Produto estéril, a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Após o uso, descartar de acordo com os regulamentos ambientais em vigor.

Prazo de validade: 36 meses se a embalagem estiver íntegra.

Armazenamento e transporte: Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C, evitando a exposição direta à luz solar e à umidade elevada



Registro ANVISA: 80463910046

Fabricado por :

ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli

CNPJ: 08.474.646.0001/12

Travessa Pedro Pok, 570 - Rodovia BR 476, Km 18.

Colombo PR

Tel: (41) 3888 4460

Resp. Técnica: Christiane M. G. Hey

CRF-PR 211

Rev. 00 26/02/2021

