

PRATICZYME

Código: FT 058

Revisão: 00

Emissão: Junho/2019

DESCRIÇÃO

PRATICZYME é um detergente enzimático para lavagem manual que possui em sua fórmula 4 enzimas ligadas a um poderoso tensoativo, que garante a remoção da matéria orgânica garantindo um processo de esterilização ou desinfecção química mais eficaz.

INDICAÇÕES

PRATICZYME é um produto indicado somente para a limpeza manual. Utilizado para limpeza e remoção da matéria orgânica contida em artigos e instrumentos médico-hospitalares, odontológicos e laboratoriais. Pode ser utilizado em endoscópios, colonoscópio, broncoscópio, fibroscópios, canulados e etc. É altamente concentrado, recomenda-se diluição de 1ml/L, onde 1 litro do produto rende 1.001 litros de solução de detergente enzimático.

ADVERTÊNCIAS

Não ingerir.

“Não misturar com outros produtos.”

“Mantenha o produto em sua embalagem original.”

Evite inalação ou aspiração, contato com os olhos e contato com a pele.

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

INSTRUÇÕES DE USO

Diluir na proporção de 1 ml de PRATICZYME para cada 1 litro de água (1:1000). A temperatura da água deve estar entre 40 a 55 °C. Em seguida aplicar o material a ser limpo na solução deixando agir com tempo de contato de 5 minutos. Na sequência enxague com água de boa procedência de forma abundante. O processo de limpeza deve ser feito frequentemente conforme a necessidade ou de acordo com protocolos existentes.

Para limpeza em temperatura ambiente, faça a mesma diluição, dilua 1 ml de PRATICZYME para cada 1 litro de água. O tempo de imersão do produto com o material deverá ser validado conforme protocolo interno na instituição para garantir maior eficácia do produto.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

PRATICZYME

Código: FT 058

Revisão: 00

Emissão: Junho/2019

"UTILIZAR IMEDIATAMENTE APÓS O PREPARO. A REUTILIZAÇÃO DA SOLUÇÃO DE LIMPEZA PODE PROVOCAR PERDA DA EFICIÊNCIA".

Recomendações sobre a água utilizada para a diluição:

- ✓ Água potável, desmineralizada ou deionizada;
- ✓ Dureza: 0 a 355 ppm;
- ✓ Condutibilidade: 0,0000050 a 200 µs/cm.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml – Caixa contendo 12 frascos.

500 ml – Caixa contendo 12 frascos.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

ANTES DE USAR, LEIA AS INSTRUÇÕES NO RÓTULO.

"PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. "

"PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. "

"PRODUTO PARA ASSISTÊNCIA À SAÚDE. "

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

"CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. "

"NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. "

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos ou a pele, lave imediatamente com água em abundância. Em caso de ingestão, não provoque vômito e consulte imediatamente o Centro de Intoxicações (CEATOX - 0800 722 6001) ou médico levando o rótulo do produto.

COMPOSIÇÃO

Álcool Isopropílico, Nonilfenol Etoxilado, Protease, Carbohidrase, Lipase, Amilase, Conservante, Estabilizante, Aditivos, Coadjuvantes, Agente de controle de pH e Veículo.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

PRATICZYME

Código: FT 058

Revisão: 00

Emissão: Junho/2019

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... De levemente amarelado a amarelo claro.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido levemente opaco a límpido.

pH:..... 6,5 a 7,5.

Densidade:..... 1,015 a 1,060 g/ml.

Atividade Amilolítica:..... No mínimo 0,059 UA. ml⁻¹.min⁻¹.

Atividade Proteolítica:..... No mínimo 0,04 UP. ml⁻¹.min⁻¹.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

Conservar em temperatura ambiente (15 a 30 °C). Manter o produto em sua embalagem original, ao abrigo da luz e calor excessivo.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

PRATICZYME

Código: FT 058

Revisão: 00

Emissão: Junho/2019

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Praticzyme – 500 ml e 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648-8029.001-9.

Praticzyme – 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648-8029.002-7.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br