



## INSTRUÇÃO DE USO

### DRENO DE PENROSE WALTEX® COM GAZE ESTERILIZADO

– Dreno –

**INDICAÇÃO:** O Dreno de Penrose é indicado para drenagem de ferimentos e pós-operatórios.

**COMPOSIÇÃO:** Látex; compressa de gaze de algodão.



### ADVERTÊNCIAS:

- Produto é fornecido estéril sob Ação do Gás Óxido de Etileno;
- Uso único;
- Produto de Reprocessamento Proibido;
- Verifique as condições do produto antes de utilizá-lo;
- Em caso de dúvidas quanto à integridade da embalagem externa, não utilizar o produto.

### PRECAUÇÕES:

- Antes de utilizar, verifique o estado da embalagem e do produto;
- Não utilizar o dispositivo, cuja embalagem foi aberta, molhada ou danificada, ou cujo prazo de validade esteja vencido, neste caso a esterilidade não é garantida;
- O produto deverá ser armazenado e transportado em lugar seco arejado e a temperatura ambiente;
- Proteger da exposição da luz (natural e artificial), pois o produto poderá sofrer oxidação, ficando impróprio para o uso;
- A largura e o comprimento do dreno devem ser proporcionais à loja a ser drenada;
- Deve ser escolhido um ponto de declive e, de preferência, usar dois ou três drenos justapostos para uma drenagem mais eficaz;
- Observar e mobilizar o dreno com intervalos de 12 horas para evitar depósitos de fibrina que possam ocluir seu lume;
- O orifício de passagem do dreno deve ser amplo, e o dreno deve ser posicionado à menor distância da loja a ser drenada;
- Ao longo do seu trajeto, deve-se evitar que o dreno esteja em contato com alças intestinais e vasos sanguíneos;



- A extremidade distal do dreno deve ser fixada á borda inferior do orifício cutâneo com fio inabsorvível, para impedir seu escape para dentro ou para fora do organismo. Nunca utilizar alfinete nesse tipo de fixação, pois o mesmo pode oxidar e contaminar o paciente;
- Não utilizar o dreno através da incisão cirúrgica e, sim, através de uma contra-incisão;
- O orifício de saída do dreno estará ocluído com gaze estéril, e, nos casos de drenagem de grande quantidade de líquidos, deve-se utilizar também uma bolsa (saco plástico coletor - estéril).
- Em caso de sensibilidade ao uso de látex, suspenda imediatamente o uso e procure um médico especialista.

### **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO:**

- Manipular de maneira asséptica;
- Proteger da exposição da luz (natural e artificial), pois o produto poderá sofrer oxidação, ficando impróprio para o uso.

**CONTRA INDICAÇÃO E EFEITOS ADVERSOS:** Contra indicado em casos de hipersensibilidade a produtos em látex. Utilizar de acordo com as instruções de uso e apenas para a finalidade proposta.

### **INSTRUÇÃO DE USO:**

1. Segure as duas pontas na extremidade superior da embalagem, puxe ao mesmo tempo até expor o dreno;
2. Utilize a compressa conforme a indicação;
3. O dreno de penrose deve ser colocado próximo a incisão cirúrgica, através de uma contra-incisão;
4. Fixar a extremidade distal do dreno ao orifício cutâneo com fio não absorvível;
5. Monitorar o dreno durante o tempo de permanência. O responsável pelo procedimento é quem irá determinar o período de permanência do dreno.

### **ARMAZENAGEM E CONSERVAÇÃO:**

- Armazenar na embalagem original em local seco, protegido da ação direta da luz e do calor;

**TRANSPORTE:** Transportar em sua embalagem original, ao abrigo de poeiras e calor excessivo.



**OBS: A apresentação do produto pode ou não incluir as instruções de uso.**

**Data de Fabricação/ Validade/ Lote nº.: Vide rótulo.  
Reg. na ANVISA nº.: 10229650009.**

**CIRÚRGICA BRASIL COMERCIAL E IMPORTADORA LTDA.**

Rua Joaquim Piza, 130/132 – Cambuci – CEP: 01528-010 – São Paulo – SP

Tel: (XX11) 3207-1522/ (XX11) 3207-8543

e-mail: [cirurgicabrasil@cirurgicabrasil.com.br](mailto:cirurgicabrasil@cirurgicabrasil.com.br)

CNPJ 47.193.115/0001-03 – *INDÚSTRIA BRASILEIRA*

Farmacêutica Responsável: Raquel Pinto de Toledo CRF-SP nº: 37.087