



FITA CIRURGICA EM SILICONE PELES SENSÍVEIS HIPOALERGÊNICA VITAL DERME

REGISTRO ANVISA 10296900154

INSTRUÇÕES DE USO

1. Selecionar o tipo e o tamanho da fita correta para a aplicação.
2. Com a pele limpa e seca, aplique a fita de silicone sem tensão;
3. Corte a fita de silicone na linha de rasgo já demarcada após a utilização;
4. Alise a fita de silicone no lugar com pressão suave e delicada.
6. Não circular completamente um membro com a fita

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Produto não esterilizado.

Produto de pronto uso.

Não usar álcool, éter, benzina ou outros solventes para auxiliar na remoção. Não usar tintura de benjoim.

Caso necessário usar vaselina.

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados, no caso de uso pelo paciente, este deve receber instruções de um profissional da área de saúde.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas repassadas por um profissional da área de saúde ao paciente.



ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

