

INSTRUÇÕES DE USO

A ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli informa que a instrução de uso a seguir se aplica aos seguintes modelos comerciais: INT000002, INT000002LR, INT000002TLR, INT003002LR, INT000004, INT000004LR, INT000004TLR, INT006207L, INT006227L e INT007208L.

EXTENSOR PARA INFUSÃO DE SOLUÇÃO PARENTERAL - INTERMEDIÁRIO

Indicação de Uso: Os extensores para infusão intermediários da ForteCare são indicados para infusão gravitacional de soluções parenterais.

Especificação:

Código interno	Descrição do Produto
INT000002	Extensor para infusão em duas vias com luer slip e clamp corta fluxo
INT000002LR	Extensor para infusão em duas vias com luer lock rotatório e clamp corta fluxo
INT000002TLR	Extensor para infusão em duas vias com luer lock rotatório, clamp corta fluxo e tampa sobressalente
INT003002LR	Extensor duas vias com primer reduzido, ponta distal luer lock rotatório
INT000004	Extensor para infusão em quatro vias com luer slip e clamp corta fluxo
INT000004LR	Extensor para infusão em quatro vias com luer lock rotatório e clamp corta fluxo
INT000004TLR	Extensor para infusão em quatro vias com luer lock rotatório, clamp corta fluxo e tampa sobressalente
INT006207L	Extensor duas vias com conector Spike
INT006227L	Extensor duas vias com conector Spike, ponto de infusão e ponta distal macho
NT007208L	Extensor três vias com conector Spike

Produto estéril, apirogênico e atóxico. **Esterilizado a gás óxido de etileno.**

Instruções de uso:

1. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade e se a embalagem está íntegra.
2. Abrir a embalagem através de técnica asséptica.
3. Retirar as tampas protetoras e conectar uma extremidade no equipo e a outra no dispositivo de acesso ao paciente.
4. Verificar ausência de vazamentos.
5. Ao término da infusão, descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. DESTRUIR APÓS O USO.

- Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade.
- Use sempre técnica asséptica quando manusear o produto.
- Produto estéril, a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Após o uso, descartar de acordo com os regulamentos ambientais em vigor.

Prazo de validade: 36 meses se a embalagem estiver íntegra.

Armazenamento e transporte: Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C, evitando a exposição direta à luz solar e à umidade elevada



Registro ANVISA: 80463910046

Fabricado por :

ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli

CNPJ: 08.474.646.0001/12

Travessa Pedro Pok, 570 - Rodovia BR 476, Km 18.

Colombo PR

Tel: (41) 3888 4460

Resp. Técnica: Christiane M. G. Hey

CRF-PR 21193

Rev. 00 26/02/2021

