

Cadastro / Registro M.S.:

10369460131

Modelos Cadastrados:

10, 11, 12, 12b, 15 e 15c, 20, 21, 22, 23 e 24

Indicação de Uso:

As lâminas de Bisturi Lamedid são utilizadas para cortar tecidos celulares, principalmente em cirurgias e procedimentos cirúrgicos.

Instrução de Uso:

As lâminas para bisturi devem ser utilizadas seguindo-se a técnica cirúrgica adequada e selecionada pelo cirurgião responsável.

1. As lâminas são montadas em um cabo de bisturi, podendo ser o cabo de número 3 ou 4.
2. Utilize a lâmina de acordo com as especificações dos cabos de bisturi:
 - 10,11,12 e 15 para cabo de bisturi n.º 3;
 - 20,21,22,23 e 24 para cabo de bisturi n.º 4;
3. Para fazer o encaixe da lâmina no cabo utilize uma pinça cirúrgica. Coloque a parte vazada da lâmina, encaixando-a na ponta do cabo de bisturi. Este procedimento deverá ser realizado com técnicas estéreis.
4. Para descartar a lâmina, é recomendado a utilização de uma pinça de Kelly. Fechando a pinça na parte superior da lâmina, puxe a lâmina do cabo desencaixando-a do cabo.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- Armazenar em local seco, limpo e livre dos raios solares.
- Não pisar ou apoiar qualquer objeto nas caixas.

Advertência/Precaução:

- Não reesterilize a lâmina.
- Em hipótese alguma utilize a lâmina, caso a mesma tenha sido contaminada.
- Ao manipular a lâmina, utilize técnicas e instrumentais adequados e assépticos.
- O procedimento de colocação e retirada da lâmina no cabo de bisturi deve ser feito com muita atenção para evitar que o usuário se corte.
- Nunca esterilizar o cabo do bisturi com a lâmina acoplada.
- Ao descartar a lâmina usada, procurar recipientes adequados para cortantes, evitando assim que pessoas possam se cortar.
- Não é recomendado a utilização da lâmina sem um cabo de bisturi, sob risco de erro na incisão ou de ferimento para o usuário.

Validade:

5 anos.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda
Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP
CNPJ: 01.005.728/0001-79
Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40
SAC: 0800 6658007
Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067
Fabricante:
SUZHOU KYUAN MEDICAL APPARATUS CO., LTD.

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso,165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525