



## LÂMINA DE BISTURI DESCARTÁVEL DE AÇO INOX ADVANTIVE

REGISTRO ANVISA 10296900127

### INSTRUÇÕES DE USO

- 1 - Retire a lâmina seguindo a palavra “abra” da embalagem de forma asséptica
- 2- Para evitar a contaminação da micro-fita pelos dedos do operador, não toque a lâmina quando a abrir a embalagem.
- 3 - Adotando a técnica cirúrgica adequada, o cirurgião deve executar a incisão.
4. O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado por Radiação Gama

Não deve ser reprocessado e reaproveitado sob hipótese nenhuma.

Leia as instruções antes de usar.

Respeitar o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

### ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

**IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joamed.com.br](http://www.joamed.com.br)

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

**IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO**

