



INSTRUÇÕES DE USO

FITA MICROPOROSA HIPOALÉRGICA MISSNER

Sua Pele Respira – Para peles sensíveis – Não deixa Resíduo na Pele

Composição: Não tecido a base de fibras de viscose e adesivo acrílico. Isento de látex.

Indicação: Como curativo secundário, para fixação de sondas, drenos, cateteres, dispositivos de infusão intravenosa e bandagens.

Modo de uso: Definir o tamanho de fita microporosa a ser utilizado conforme cada ferida/curativo primário. Rasgue ou corte a fita e fixe-a sobre a pele e/ou curativo primário. Faça pressão leve a moderada com os dedos sobre a fita para obter melhor fixação do produto.

Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Em caso de irritação, suspenda o uso.

Precaução: A validade condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto Não Estéril. Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Manter em temperatura entre 10° e 40°C, com umidade até 90%.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Resp. Técnico: Dionei Neves
CRQ/13 - SC - Nº 13.302.213

Cadastro Anvisa Nº: 80003300024

Atendimento ao Consumidor
Fone 0800 470015
Email: missner@missner.com.br
www.missner.com.br