



INSTRUÇÕES DE USO

ESPARADRAPO IMPERMEÁVEL MISSNER

Extra flexível

Composição: Tecido 100% algodão com tratamento acrílico e adesivo a base de óxido de zinco, borracha natural e resinas. CONTÉM LÁTEX DE ORIGEM NATURAL. PODE CAUSAR ALERGIA.

Indicação: Somente para fixação de curativos, sondas, drenos, catéteres, dispositivos de infusão intravascular, bandagem, etc.

Modo de uso: Definir o tamanho de esparadrapo a ser utilizado conforme cada ferida/curativo primário. Rasgue ou corte a fita e fixe-a sobre a pele e/ou curativo primário. Faça pressão leve a moderada com os dedos sobre o esparadrapo para obter melhor fixação do produto.

Advertências: Produto de uso único. Destruir após o uso. Em caso de irritação, suspenda o uso.

Precaução: A validade condiciona a manter em local limpo, seco e ao abrigo da luz. Produto Não Estéril. Manter em temperatura entre 10° e 40°C, com umidade até 90%.

Validade: 2 anos a partir da data de fabricação.

Resp. Técnico: Dionei Neves
CRQ/13 - SC - Nº 13.302.213

Cadastro Anvisa Nº: 80003300017

Atendimento ao Consumidor
Fone 0800 470015
Email: missner@missner.com.br
www.missner.com.br