



FOLHETO DE INSTRUÇÃO DE USO:

Marca: M-TEC – Missner Tecnologia de Curativos

CURATIVO DE ESPUMA DE SILICONE COMFORT



Indicado para feridas de moderada a alta exsudação

A Espuma de Silicone Comfort M-TEC adapta totalmente ao leito da ferida proporcionando absorção superior, mesmo sob compressão, absorvendo o exsudato da ferida e mantendo-o dentro de sua estrutura, oferecendo as condições ideais para cicatrização de ferida em meio ambiente. A camada adesiva de silicone proporciona ajuste seguro para manter o curativo em seu lugar e assegurar dor mínima durante a remoção. Apresenta uma abertura sem toque para uma aplicação fácil e asséptica.

Composição: Composto por uma camada adesiva de silicone, um filme de barreira de poliuretano (PU), uma espuma absorvente de Poliuretano (PU). Isento de látex

Indicação: os curativos de Espuma de Silicone Comfort M-TEC são indicados para feridas de moderado nível de exsudato; feridas superficiais; proteção de tecido epitelial novo.

Precauções: Não reutilize o curativo, pois pode comprometer a esterilidade e / ou o desempenho do curativo. Não ingerir e manter afastado de crianças e animais.

Para uso sob orientação de um profissional de saúde. Somente para uso externo. Em caso de irritação, descontinue o uso e procure orientação médica.

Advertências: Não use em indivíduos com uma sensibilidade conhecida para filmes ou espumas de poliuretano. Não use com soluções oxidantes, como hipoclorito ou peróxido de hidrogênio, pois podem derrubar o componente absorvente de poliuretano do curativo. Produto de uso único. Destruir após o uso.

Condições de Armazenamento e Conservação: Manter em local limpo e ao abrigo da luz. Aconselhável manter em temperatura abaixo de 25°C.

Instruções de Uso

1. Irrigar o local da ferida de acordo com o protocolo padrão, se necessário, e secar a pele circundante antes de aplicar o curativo.
2. Selecione um tamanho do Curativo de Espuma de Silicone Comfort M-TEC que é ligeiramente maior do que a ferida.
3. Centralize o curativo e aplique suavemente sobre o local da ferida (lado branco em contato com a ferida).
4. Descarte qualquer material remanescente do curativo devido ao risco de contaminação.

Troca e Remoção do Curativo

1. O Curativo de Espuma de Silicone Comfort M-TEC pode permanecer no local por até 7 dias, dependendo da condição do paciente e do nível de exsudado. Inicialmente, pode ser necessário observar a ferida frequentemente e até trocar o curativo sempre uma boa prática de cuidados com ferida seja necessário.
2. Remova cuidadosamente o curativo do leito da ferida e descarte-a. Descarte de acordo com os procedimentos e diretrizes locais.
3. Se necessário, limpe o local da ferida com produtos adequados para feridas antes da aplicação de um novo curativo.

Fabricado por: Pharmaplast SAE. Amria Free Zone 23512, Alexandria, Egypt.

Distribuído por: Missner & Missner Ltda. Rodovia BR-470, 2870 - Km 54,6. Blumenau - SC. Indústria Brasileira. CNPJ Nº 03.225.411/0001-73.

Produto Estéril por Óxido de Etileno. USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR.

Resp. Técnico: Dionei Neves / CRQ/13 - SC - Nº 13.302.213.

Cadastro Anvisa Nº:



Missner & Você
www.missner.com.br
0800 47 0015
missner@missner.com.br

Missner
Um toque de cuidado

Lista e significado dos símbolos utilizados nas embalagens

	Temperatura limite recomendada de armazenamento (<math><25^{\circ}\text{C}</math>/<math><77^{\circ}\text{F}</math>)		Não reesterilizar		Cuidado		Lote
	Não reutilizar		Não utilizar se a embalagem estiver violada		Indicado para feridas de moderada a alta exsudação		Referência do catálogo
	Esterilizado por Óxido de Etileno		Consulte as instruções de uso		Data de Validade		Mantenha em local seco.