

**INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO SERINGA HIPODÉRMICA ESTÉRIL DE  
USO ÚNICO COM e SEM AGULHA**

**Instruções de uso de seringas hipodérmicas  
estéreis de uso único manual**

Para garantir a esterilidade do medicamento e dos materiais utilizados, são necessários cuidados que vão desde a lavagem das mãos, uso de luvas de procedimento até o preparo fial da seringa.



1 Abra embalagem da seringa utilizando o local correto de abertura (pétalas), sempre pelo lado do êmbolo da seringa para diminuir o risco de contaminação.



2 Pressione o êmbolo simulando o movimento de injeção até encostar no ponto zero da escala, para assim, realizar o destravamento da seringa e distribuição uniforme do silicone.



3 Conecte a agulha aplicando uma força contra a seringa e rotacionando-a para que ela se fixe.



4 Aspire a solução preparada para a seringa sempre um pouco acima do volume desejado, gire ou bata levemente na seringa para desfazer eventuais bolhas de ar, expulse o ar, acertando e conferindo o volume final.



5 Após o uso da seringa com agulha de aspiração, faça o reencepe passivo desta agulha e troque por uma agulha hipodérmica para realizar a aplicação.

**PARA DESCARTE**

Para descartar o material deve-se seguir procedimentos internos do local de trabalho, atentando-se para algumas instruções básicas:

- Descartar seringas e agulhas após o uso em locais identificados para este fim (coletores próprios);
- Procurar seguir as várias normas referentes ao gerenciamento de lixo hospitalar.

  
SALDANHA RODRIGUES LTDA. - FILIAL  
Farm. Américo Kaname Kayano  
Responsável Técnico  
CRF 5651/MS