

**SERINGA DESCARTÁVEL SEM AGULHA ADVANTIVE**

**REGISTRO ANVISA 80090670020**

**INSTRUÇÕES DE USO**

- 1 - Abrir a embalagem de forma asséptica;
- 2 - Escolher a agulha conforme procedimento a ser realizado
- 3 - Conectando a agulha aplicando uma força e racionando-a para que ela fique travada. Se houver alguma demora na preparação mantenha a seringa dentro da embalagem;
- 4 - Não toque na agulha, bico da seringa ou na haste (parte que fica dentro do cilindro) durante o manuseio da seringa;
- 5 - Retire o protetor da agulha
- 6 - Aspirar o medicamento;
- 7 - Eliminar o ar de dentro do cilindro;
- 8 - Fazer a assepsia no paciente no local da aplicação;
- 9 - Utilizar a seringa conforme técnica adequada para administração de medicamento injetável;
- 10 - Caso a agulha não possua protetor de segurança, realizar o descarte sem fazer o reencape da agulha
- 11 - O produto deve ser descartado em recipientes com paredes rígidas, inquebrável, boca larga e tampa;

**ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Abrir a embalagem de forma asséptica.

O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Artigo médico-hospitalar de uso único.

Destruir após o seu uso. Atóxico. Livre de pirogênicos. Proibido reprocessar.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.

Este material destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e treinados.

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

## **ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

## **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

Masif Artigos Médicos e Hospitalares Ltda | CNPJ 03.968.926/0001-63

Rua: Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

## **IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO**

