



CANULA ENDOTRAQUEAL COM BALÃO VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900093

INSTRUÇÕES DE USO

1. Abrir a embalagem de forma asséptica.
2. Antes de iniciar a técnica de intubação retire todo o ar do balão;
3. Inserir a cânula, procedendo conforme técnica médica atualmente aceita.
4. Insufle o balão de acordo com o mínimo de volume necessário para proporcionar ventilação adequada;
5. Ajustar a posição da cânula corretamente. Isso se dá pela inexistência de ruídos respiratórios em ambos os campos pulmonares e pela inexistência de borborigmo no epigástrico.
6. Conectar a cânula ao ambú e/ou ventilador.
7. Fixar a cânula ao paciente segundo as técnicas médicas atualmente aceitas
8. Verificar a cada 2 (duas) horas o posicionamento da cânula, assim como a eficácia de sua utilização. Caso seja detectado qualquer problema, substituir o produto.
9. Extubar o paciente seguindo as técnicas médicas atualmente aceitas.
10. A inserção da cânula endotraqueal poderá ser confirmada pela visualização da posição da ponta do tubo por radiografia.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Lave bem as mãos e utilize luva descartável.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Abrir a embalagem de forma asséptica

Artigo médico-hospitalar de uso único.

Destruir após a sua utilização.

Ler as instruções antes de usar.

Não deverá ser reprocessado ou reaproveitado sob hipótese alguma.

Respeitar sempre o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não utilizar o produto.



O produto deverá ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

A avaliação, decisão e manuseio do produto deveram ser feito exclusivamente por médico devidamente habilitado

As precauções e cuidados especiais fazem parte da rotina adotada de procedimentos aos quais os profissionais estão aptos a realizar quando se tratar de uso hospitalar.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES

Contraindicado na utilização em pacientes conscientes, pois poderá causar indução a êmese.

Contraindicado em pacientes que sofram de edema de laringe e/ou ferimento de vértebra cervical e/ou tórax que oprima a traqueia.

Inflamação de traquéia.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joamed.com.br
Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

