

INSTRUÇÃO DE USO - EQUIPO

Nº REGISTRO 80288090044

NOME TÉCNICO Equipos

INDICAÇÃO DE USO Os Equipos são indicados para uso por profissionais da área médica com a finalidade de infundir soluções parenterais em pacientes por gravidade. Pode ser usado combinado com agulhas, escalpes, catéter, torneira e outros dispositivos de infusão.

MECANISMO DE AÇÃO O Equipos permite a administração de soluções contidas em um determinado recipiente para o sistema circulatório do paciente, por gravidade.

INSTRUÇÃO DE USO 1- Abrir a embalagem de forma asséptica; 2 - Feche o regulador de fluxo totalmente; 3 - Retirar o dispositivo do invólucro protetor; retirar o protetor do penetrador e conecte no frasco/ampola da solução; 4 - Preencha a câmara de gotejamento com a solução até um terço ou metade da sua altura; 5 - Em caso de equipo com respiro de ar, abrí-la após preenchimento da câmara de gotejamento; 6 - Abra o regulador de fluxo, até que o líquido preencha totalmente o tubo flexível, para evitar bolhas de ar; 7 - Após o preenchimento de todo o tubo flexível feche novamente o regulador de fluxo; 8 - Retire o protetor do conector e encaixe no dispositivo de infusão (escalpe, agulha, cateter, etc) de acordo com as normas técnicas assépticas; 10 - Abra o regulador de fluxo e ajuste a velocidade do gotejamento de acordo com a prescrição médica; 11 - Use o injetor lateral para medicação complementar.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES Artigo médico hospitalar de uso único, estéril, descartável. Esterilizado por Óxido de Etileno. Validade de cinco anos após a data de esterilização. Manter o produto em ambiente limpo, seco e fresco; temperatura ambiente e com os cuidados necessários para que a embalagem permaneça íntegra.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO **TKL IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA.**
Matriz: Rua Engenheiro Júlio César de Souza Araújo, 220 | CIC | CEP: 81290-270 | Curitiba | PR | Brasil | Fone: +55 41 3022.0926
Filial: Av. Nilo Bittencourt, 55 | Unidade 05 | São Vicente | CEP: 88312-400 | Itajaí | SC | Brasil
www.tklbrasil.com.br | comercial@tklbrasil.com.br | @tkl_brasil
Responsável Técnica: Kelen Rymysza | CRF/PR: 16.462