



TORNEIRINHA DESCARTÁVEL DE TRÊS VIAS VITALGOLD

REGISTRO ANVISA 10296900040

INSTRUÇÕES DE USO

- 1.Retire a torneira de sua embalagem em condições assépticas.
- 2.Conecte o conector luer (macho) ao equipo e/ou cateter, retire o ar e conecte ao sistema circulatório do paciente.
- 3.O conector luer (fêmea) fica livre para que o profissional conecte seringas ou equipos para realizarem a perfusão que considerem necessárias.
- 4.Para que possa ocorrer a perfusão, é só virar a chave para liberar a passagem ou as passagens para os medicamentos. Um único “clique” indica que está seguramente no lugar.
- 5.Descarte o produto após o uso seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Não deve ser reprocessado e reaproveitado sob hipótese nenhuma.

Leia as instruções antes de usar.

Respeitar o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

CONTRAINDICAÇÕES

O produto é contra indicado para administração de líquidos de alta viscosidade e lipídios, transfusão de sangue e em bomba de infusão.



ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33
Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br
Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

