

**OXI REMOV**

Código: FT 056

Revisão: 00

Emissão: Fevereiro/2019

**DESCRIÇÃO**

OXI REMOV é uma solução ácida desenvolvida para a remoção de manchas e da oxidação do material instrumental cirúrgico inoxidável. A fórmula balanceada do OXI REMOV é concentrada, proporcionando melhor desempenho e revitalização de utensílios oxidados, incrustações minerais e revitalização de instrumento cirúrgico e odontológico.

Orienta-se estabelecer uma rotina preliminar de aplicação do OXI REMOV duas vezes na semana durante o mês, com o propósito de restaurar o estado padrão dos instrumentos e o estabelecimento de uma rotina quinzenal com o caráter preventivo e de conservação dos instrumentos a serem utilizados.

**INDICAÇÕES**

OXI REMOV é um detergente antiferruginoso, biodegradável, indicado para remoção de oxidação e revitalização de instrumentais cirúrgicos e odontológicos. O OXI REMOV também é indicado para outros utensílios em aço inoxidável, sendo um produto de remoção total e simples da oxidação de acordo com testes laboratoriais.

**ADVERTÊNCIAS**

“PERIGO! Provoca lesões oculares graves.”

“Não ingerir.” Provoca queimadura severa à pele e dano aos olhos. Não inale vapores e aerossóis. Use avental, luvas de borracha, máscara, óculos e botas de proteção. Lave as mãos cuidadosamente após o manuseio.

“Não misturar com outros produtos. Mantenha o produto em sua embalagem original.”

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

**INSTRUÇÕES DE USO**

Materiais extremamente oxidados: Dilua 1 litro de OXI REMOV para cada 6 litros de água quente na temperatura de 60-80 °C. Realize a imersão completa dos instrumentos previamente limpos na solução deixando agir no tempo de contato de 30 a 40 minutos. Em seguida insira os instrumentos articulados na solução, assegurando que eles estejam acionados para melhor penetração do produto e aderência

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

**OXI REMOV**

Código: FT 056

Revisão: 00

Emissão: Fevereiro/2019

aos materiais. Escove as manchas em intervalos regulares para o desprendimento das placas minerais, nesse procedimento utilizar escova não metálica de cerdas duras. Enxágue abundantemente. Em instrumentos muito danificados é indicado que se repita o procedimento em uma nova solução.

Preservação e brilho dos materiais: Dilua 1 litro de OXI REMOV para cada 16 litros de água quente na temperatura de 60-80 °C. Realize a imersão completa dos instrumentos previamente limpos e deixe agir no tempo de contato de 30 a 40 minutos. Em seguida insira os instrumentos articulados na solução, assegurando que eles estejam acionados para melhor penetração do produto e aderência aos materiais. Escove as manchas em intervalos regulares para o desprendimento das placas minerais, nesse procedimento utilizar escova não metálica de cerdas duras. Enxágue abundantemente.

**APRESENTAÇÕES**

5000 ml - Caixa contendo 2 galões.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos.

**PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA**

“PRODUTO EXCLUSIVAMENTE DE USO PROFISSIONAL. ”

“PROIBIDA A VENDA DIRETA AO PÚBLICO. USO ASSISTÊNCIA À SAÚDE. ”

ANTES DE USAR LEIA AS INSTRUÇÕES DO RÓTULO.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS. ”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA. ”

**PRIMEIROS SOCORROS**

EM CASO DE INGESTÃO: Lave a boca. Não provoque vômito. EM CASO DE CONTATO COM A PELE: Retire imediatamente toda a roupa contaminada. Lave a pele com água e tome um banho. EM CASO DE CONTATO COM OS OLHOS: Lave cuidadosamente com água durante vários minutos. No caso de uso de lentes de contato, remova-as, se for fácil. Continue enxaguando. EM CASO DE INALAÇÃO: Remova a pessoa para um local ventilado e em uma posição que não dificulte a respiração. Tratamento específico.

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)

**OXI REMOV**

Código: FT 056

Revisão: 00

Emissão: Fevereiro/2019

**COMPOSIÇÃO**

Ácido fosfórico, Aditivo, Solvente, Adjuvante, Conservante e Veículo.

**PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS**

Cor da solução:..... Incolor a levemente amarelado.

Odor:..... Característico.

Aparência:..... Líquido límpido.

pH:..... 0,5 a 2,0.

Densidade:..... 1,110 a 1,150 g/ml.

**PRAZO DE VALIDADE**

02 anos.

**CONSERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO**

Conservar em local fresco, seco e bem ventilado, proteger contra temperaturas acima de 50 °C. Mantenha o produto em sua embalagem original, em local fresco com ventilação natural ou longe de fontes de calor, combustíveis e gases comprimidos.

**DESCARTE**

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.

Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

**OXI REMOV**

Código: FT 056

Revisão: 00

Emissão: Fevereiro/2019

**REGISTRO ANVISA**

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Oxi Remov - 1L

Registro na ANVISA/MS Nº 3.2648-8028.001-3.

Oxi Remov - 5L

Registro na ANVISA/MS Nº 3.2648-8028.002-1.

**VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda**

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - [sac@vicpharma.com.br](mailto:sac@vicpharma.com.br)