

MODELO DE INSTRUÇÃO DE USO

ULTRA GEL

Gel para Ultra-som

DESCRIÇÃO

O produto consiste em um gel, a base de água, indicado para uso como meio de contato para transmissão ultra-sônica, usado entre a área a ser examinada e o aparelho de ultrassonografia utilizado pelo médico, impedindo a presença de ar entre as partes e facilitando o deslizamento sobre a área a ser examinada, proporcionando um ideal contato pele-transdutor.

O produto é utilizado apenas como meio de contato entre a área examinada e o transdutor do aparelho de ultrassonografia utilizado pelo médico.

CARACTERÍSTICAS

Consistência adequada

Componentes de alta pureza

Hidrossolúvel, facilmente removível.

Hipoalergênico

Acusticamente correto para as gamas de frequência comumente empregadas

Alto rendimento

COMPOSIÇÃO:

Água purificada

Carbômero

EDTA

Trolamina

Glicerol

Nipagim

Essência

INDICAÇÕES E FINALIDADE DE USO:

Indicado como meio de contato entre a pele do paciente e o transdutor do aparelho de ultrassonografia

MODO DE USAR:

Aplicar sobre a área a ser examinada ou diretamente no transdutor.

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS OU CUIDADOS ESPECIAIS

O produto é de uso exclusivamente externo, é atóxico e hipoalergênico, não oferecendo em geral nenhum risco ao usuário.

Na hipótese de alguma reação adversa, suspender o uso e procurar orientação médica.

APRESENTAÇÃO

O produto será comercializado em frasco plástico contendo 100, 250 ou 300 gramas, garrafa plástica contendo 1 ou 2 kg ou ainda em bombonas contendo 5 kg, nas apresentações: ULTRA, FISIO, OSTEO E ESTÉTICA

CUIDADOS DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

Deve ser armazenado em local seco, ao abrigo da luz, em temperatura ambiente.

DESCRIÇÃO PARA A EFICÁCIA E SEGURANÇA DO PRODUTO

O produto apresenta-se eficaz e seguro para a finalidade a que se destina, desde que sejam seguidos as orientações, suas advertências e seu modo de uso.

Resp. Técnico: Nivia Freitas do Nascimento

CRF/MG 26042

Fabricado por:

MULTIGEL IND. COM. DE PROD. GELATINOSOS LTDA

Rua Francisco Andrade, 111, Faixa Verde.

CEP. 37560-000 – Silvianópolis - MG

CNPG 49.604.226/0001-90.

Ind. Brasileira.

Notificação ANVISA N °:

Responsável Técnico
Nivia Freitas do Nascimento
CRF/MG 26042

Representante Legal
Valmir Castillo Sanches