

ÁLCOOL 70% - Saneante

Código: FT 016

Revisão: 03

Emissão: Novembro/2019

DESCRIÇÃO

Álcool 70 VIC PHARMA é um desinfetante hospitalar indicado para superfícies fixas e artigos não críticos. É uma solução alcoólica que possui ação bactericida graças à desnaturação de proteínas. Na ausência de água, as proteínas não são desnaturadas tão rapidamente como na presença desta. Este mecanismo de ação justifica o fato do álcool etílico absoluto ser um agente desidratante e ter uma potencial ação bactericida menor que a mistura de álcool e água em proporções adequadas.

INDICAÇÕES

Álcool 70 VIC PHARMA é utilizado puro, destinado à desinfecção de superfícies fixas de ambientes hospitalares, casas de saúde, ambulatórios, estabelecimentos de assistência à saúde e consultórios odontológicos, além da desinfecção de artigos não críticos.

ADVERTÊNCIAS

CUIDADO! IRRITANTE PARA OS OLHOS.

ATENÇÃO. Conservar fora do alcance de crianças e animais domésticos.

Não ingerir. Não misturar com outros produtos. Não utilizar para desinfecção de alimentos.

Não perfurar a embalagem. Não aplicar próximo a chamas. Não expor a temperatura superior a 50 °C.

Manter afastado do fogo e do calor. Não perfurar a tampa. Não derramar sobre o fogo.

“Água: pode faltar. Não desperdice.”

CONTRAINDICAÇÕES

Não é indicado o uso em acrílico ou materiais sensíveis a álcool, pode enrijecer borrachas e plásticos em geral. Pode danificar lentes de equipamentos.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

ÁLCOOL 70% - Saneante

Código: FT 016

Revisão: 03

Emissão: Novembro/2019

INSTRUÇÕES DE USO

Para superfícies fixas: Primeiramente deve-se lavar, enxaguar e secar a superfície removendo toda sujidade. Na sequência, aplicar o Álcool 70 VIC PHARMA puro, deixando em contato por 10 minutos. Não é necessário enxaguar.

Para artigos não fixos: Lavar o artigo para remover todo tipo de sujidade, enxaguar e secar os artigos. Em seguida imergi-los no Álcool 70 VIC PHARMA puro, deixando em contato por 10 minutos. Utilizar o artigo o mais breve possível.

APRESENTAÇÕES

5000 ml – Caixa contendo 2 galões.

1000 ml - Caixa contendo 12 frascos litro.

PRECAUÇÕES DE SEGURANÇA

PERIGO! Causa danos se ingerido. Não comer, beber ou fumar durante a aplicação. Cuidado, inflamável! Mantenha longe do fogo e de superfícies aquecidas.

TELEFONE DE EMERGÊNCIA HOSPITAL DAS CLÍNICAS - CEATOX - 0800-148110.

“CONSERVAR FORA DO ALCANCE DAS CRIANÇAS E ANIMAIS DOMÉSTICOS.”

“NÃO REUTILIZAR A EMBALAGEM VAZIA.”

PRIMEIROS SOCORROS

Em caso de contato com os olhos e pele, lavar com água em abundância durante 15 minutos. Se a irritação persistir consulte um médico, levando a embalagem ou o rótulo do produto. Disk Intoxicação (CEATOX) - 0800.772.6001.

Em caso de ingestão acidental, não induzir o vômito. Consulte um médico imediatamente, levando a embalagem ou o rótulo do produto.

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br

ÁLCOOL 70% - Saneante

Código: FT 016

Revisão: 03

Emissão: Novembro/2019

COMPOSIÇÃO

Álcool etílico..... 78,0 ml
Água Deionizada (q.s.p)..... 100 ml

PROPRIEDADES FÍSICO-QUÍMICAS

Cor da solução:..... Incolor.
Odor:..... Característico de álcool.
Aparência:..... Líquido límpido e volátil.
pH:..... 5,50 a 8,50.
Densidade:..... 0,876 a 0,886 g/ml.
Teor Alcoólico:..... 68,0 a 72,0 INPM.

PRAZO DE VALIDADE

02 anos.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Conservar a embalagem em local arejado afastado do fogo e do calor. Conservar a embalagem bem fechada após o uso.

DESCARTE

Resíduo do produto: Incineração ou coprocessamento de acordo com a legislação municipal, estadual e/ou federal vigentes e órgãos ambientais.
Embalagens contaminadas com o produto: Não reutilizar as embalagens vazias.

ÁLCOOL 70% - Saneante

Código: FT 016

Revisão: 03

Emissão: Novembro/2019

REGISTRO ANVISA

Autorização de Funcionamento ANVISA: AFE/MS Nº 3.02.648-8.

Álcool 70 - 1L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8033.001-0

Álcool 70 - 5L

Registro na Anvisa/M.S.: 3.2648.8033.002-9

VIC PHARMA Indústria e Comércio Ltda

R. Geraldo Rosa, 62 - Distrito Industrial – Taquaritinga – SP.

CNPJ: 39.032.974/0001-92

Responsável Técnico: Célia R. R. O. Sassi - CRF SP 14.815

SAC: 0800 606 8134 - sac@vicpharma.com.br