

**Cadastro / Registro M.S.:**

10369460086

**Modelos cadastrados:**

- Torneira de três vias slip
- Torneira de três vias

**Indicação de Uso:**

A torneira de três vias é utilizada para conectar cateteres e/ ou escalpes a todos os tipos de equipos endovenosos, tubos extensores e seringas, de maneira segura.

As conexões fêmea luer-lock destinam-se à conexão de equipos e extensores e a conexão macho luer-slip destina-se à conexão de escalpes e cateteres.

**Instrução de uso:**

1. Verificar a integridade da embalagem e a data de validade do produto.
2. Após a garantia do acesso venoso periférico através da punção por cateter ou escalpe, abrir a embalagem de modo asséptico.
3. Encaixar a torneira de três na câmara do dispositivo endovenoso utilizado na punção (cateter ou escalpe) pela conexão macho.
4. Através de uma das conexões fêmeas, conectar equipo ou extensor
5. A segunda pode ser utilizada para a administração de soluções e medicamentos através de seringas.
6. Direcionar o fluxo, orientado pelas setas indicativas.

**Conservação, Armazenamento e Transporte:**

- **Condições de armazenamento:** armazenar a temperatura ambiente (15°C a 30 °C) em local fresco e seco.
- **Condições de transporte:** transportar a temperatura ambiente (15°C a 30°C) em local fresco e seco.
- **Condições de manipulação:** manipular a temperatura ambiente (15°C a 30°C) em local fresco e seco.

**Advertência/Precaução:**

- **Advertências:**

A torneira de três vias deve ser utilizada por profissional da saúde devidamente treinado.

Este produto é incompatível com medicamentos viscosos, solução parenteral (NPP), produtos que contenham lípideos em sua composição, sangue e hemoderivados.

- **Precauções:**

Nenhuma, desde que utilizado para finalidade à qual se destina e de acordo com as instruções de uso.

- **Descarte:** Após o uso descartar a torneira de três vias em local apropriado para materiais potencialmente contaminados.

**Validade:**

**Prazo de validade:** 5 anos.

**Contraindicação:**

A torneira de três vias não pode apresentar vazamentos durante o uso. No caso de vazamentos, substituir o produto e entrar em contato com o fornecedor.

**Importado e Distribuído:****Importador:**

**Matriz:** Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.

Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

**CNPJ:** 01.005.728/0001-79

**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40

**SAC:** 0800 6658007

**Resp. Técnica:** Luciana J Lanzillo – CRF/SP: 41067

**Fabricante:**

**POLY MEDICURE LTD.**

Plot nº 104-105, Sector 59 HSIDC Industrial Area

Ballabgarh, Faridabad 121-1004

India