



INSTRUÇÃO DE USO CATÉTER PARA OXIGÊNIO - MARK MED

INFORMAÇÕES DE IDENTIFICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

O produto Cateter para oxigênio – Mark Med é um cateter confeccionado em tubo de PVC, atóxico, apirogênico, verde, transparente de paredes finas e maleáveis, pode ser encontrado em duas apresentações: **tipo Sonda**, com 40 cm de comprimento nos calibres: 04, 06, 08 (uso infantil) 10, 12, 14, 16 e 18 Fr (uso adulto) com ponta arredondada e fechada, com 4 furos laterais e provida na outra extremidade de um conector padrão; e **tipo Cateter Óculos**, nos calibres: 06, 08 e 12, com tubo principal de PVC de 90, 150 e 210 cm de comprimento, com conector “Y” ligado ao conector nasal através de dois tubos de acesso nasal de PVC de aproximadamente 50 cm e provido, na outra extremidade, de um conector padrão, totalizando 140, 200 e 260 cm de comprimento. As duas apresentações do produto serão embaladas individualmente em envelopes confeccionados em papel grau cirúrgico, identificado, contendo 01 unidade e acondicionado em caixa de papelão. Esterilizado por Radiação Ionizante ou Oxido de etileno com validade de 4 anos a partir da data de fabricação do lote, desde que a embalagem não tenha sido violada.

INDICAÇÃO/ FINALIDADE:

Cateter para Oxigênio ou Cateter tipo Óculos é indicado para administração de oxigênio via nasal, para auxiliar na respiração do paciente, sendo utilizado pelos profissionais da área médico-hospitalar.

CONDIÇÕES ESPECIAIS DE ARMAZENAMENTO / CONSERVAÇÃO / MANIPULAÇÃO:

Transportar e estocar o produto em local seco, em temperatura ambiente evitando exposição ao sol, poeira, calor excessivo e umidade. A manipulação deverá ser feita apenas por pessoas devidamente especializadas na área médico-hospitalar tais como enfermeiro(a).

INSTRUÇÕES PARA USO DO PRODUTO:

TÉCNICAS DE USO:

Para Cateter Tipo Sonda deve-se orientar o paciente para limpar as fossas nasais com lenço de papel. Desengordurar o nariz e a testa do paciente com gazes umedecidas. Elevar a ponta do nariz usando o dedo indicador da mão esquerda, segurar o cateter com a gaze seca. Medir externamente a distância entre a fossa nasal e o lóbulo da orelha e demarcar o cateter com esparadrapo. Umedecer a gaze e passar no cateter. Introduzir o cateter com mão direita em uma das narinas até a marca do esparadrapo. Fixar o esparadrapo no nariz e na testa do paciente. Abrir e regular a válvula de saída do oxigênio de acordo com prescrição, conectar o cateter ao tubo de extensão do frasco. Observar a permeabilidade do cateter e o fluxo do oxigênio periodicamente.

Para Cateter Tipo Óculos deve-se adaptar o cateter nasal nas narinas do paciente. Passar os tubos na parte posterior das orelhas do paciente, fazendo com que as mesmas sirvam de apoio para o cateter. Ajustar o cateter no paciente com o auxílio do conector.

PRECAUÇÕES DE USO/ RESTRIÇÕES DE USO:

Utilizar sempre a técnica asséptica, para reduzir o risco de infecção. Ao manusear o material esterilizado é fundamental lavar as mãos com água e sabão, secar e calçar as luvas para efetuar o procedimento. Utilizar o material com a embalagem íntegra, seca, sem manchas e identificada. Trabalhar de frente para o material e evitar tossir, expirar e falar sobre o material exposto. Abri-lo iniciando-se pela extremidade oposta ao manipulador. Cada sonda deve ser usada uma só vez. Não utilizar os produtos que apresentem suas embalagens danificadas e/ ou prazo de validade do produto e da esterilização vencidos. Abrir a embalagem, somente no momento do uso.

ADVERTÊNCIAS:

Esterilizado por Radiação Ionizante ou por Oxido de Etileno. Não Reutilizar. O produto deve ser mantido em sua embalagem original até o momento de seu uso, com os devidos cuidados da área médico-hospitalar.

CONTRA-INDICAÇÕES E EFEITOS ADVERSOS:

Este produto não apresenta contra-indicações, nem efeitos adversos, entretanto recomenda-se que o manuseio do produto seja realizado por enfermeiro (a), médico ou profissional conhecedor das técnicas deste tipo de produto.

**ARTIGO MÉDICO HOSPITALAR- DESTRUIR APÓS O USO – USO ÚNICO – PROIBIDO REPROCESSAR - ESTÉRIL
RESPONSÁVEL TÉCNICO: LILIA MARA F. BUENO - CRF/SP N.º 87381**

FABRICADO POR:

MARK MED INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA.

Rua Expedicionário José Franco de Macedo, 27 - Bairro Penha - CEP: 12929-460 - Bragança Paulista – SP.

CNPJ(MF). 59.556.621/0001-07 – TEL/FAX.:(0**11) 4035-6272 INDUSTRIA BRASILEIRA

e-mail:markmed@markmed.com.br – AUT.FUNC.ANVISA/MS n°1020782

MS: 1.02078.200-20