

JOÃOMED COMÉRCIO DE MATERIAIS CIRÚRGICOS S.A.

DRENO DE SUCÇÃO VITALSUC

REGISTRO ANVISA 10296900146

INSTRUÇÕES DE USO

- 1. Inspecionar visualmente o produto quanto à integridade da embalagem anteriormente ao uso.
- 2. Abrir a embalagem somente no momento do uso com as mãos devidamente higienizadas de forma asséptica.
- 3. Verificar se a capacidade do frasco coletor escolhido é compatível com o paciente.
- 4. Após a introdução do dreno no paciente, pressionar o coletor (bomba) até que esteja murcho, sem ar e conectar o dreno ao reservatório na tampa, dando início a sucção.
- 5. Encaixar os conectores com cuidado para evitar vazamento.
- 6. Quando o reservatório estiver cheio, repetir a operação com o clamp corta fluxo fechado.
- 7. Descartar o produto após o uso em local apropriado.

ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado a óxido de etileno

Não deve ser reprocessado e reaproveitado sob hipótese nenhuma.

Leia as instruções antes de usar.

Respeitar o prazo de validade

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.



IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR

Joãomed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33 Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - www.joaomed.com.br Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO

