

BD Plastipak Seringa Hipodermica sem Agulha

Seringa Hipodérmica é um dispositivo médico desenvolvido para aplicação de soluções por via parenteral.

Instruções de Uso:

- A escolha do calibre e tamanho da agulha, deve ser avaliado, levando-se em consideração a via de administração, o tipo de medicação, o IMC e a idade do indivíduo.
- Se a agulha não estiver conectada, conecte-a na seringa antes do uso.
- Mantenha a agulha coberta com o protetor até o momento do uso para evitar danos à ponta e contaminação da agulha.
- Ao final da injeção, descarte a seringa agulhada num coletor de perfurantes e/ou cortantes, sem reencapar a agulha.

PRECAUÇÕES E INFORMAÇÕES IMPORTANTES PARA SEGURANÇA:

CUIDADO: Para prevenir o HIV, HepB, HepC e outras doenças infecto-contagiosas através de acidentes com perfurantes e/ou cortantes:

A- Não recoloque o protetor em agulhas usadas. Descarte seringas com agulhas sem protetores em coletores apropriados, de paredes rígidas.



B- Caso isto não seja possível, recoloque o protetor nas agulhas utilizando técnica passiva de recolocação, isto é, não segurando o protetor da agulha durante a recolocação, e não forçando-o contra a ponta da agulha, evitando que esta penetre o protetor.

C- Siga as recomendações de seu local de trabalho com relação à prevenção de acidentes com perfurantes e/ou cortantes.

D- Siga as recomendações do Ministério da Saúde.

Atenção: A reutilização pode levar a uma infecção ou outra doença/lesão.

Apirogênico. Atóxico

Esterilizado por óxido de etileno

Produto de uso único. Descartar após o uso. Proibido reprocessar

Produto não é feito com látex de borracha natural

Transportar na embalagem original

Armazenar em local seco e limpo

Proteger da luz

Não usar caso a embalagem tenha sido previamente aberta ou violada

Recuse a embalagem no ato do recebimento se houver violação na fita seladora da embalagem.



Fabricante:

Becton Dickinson Indústrias Cirúrgicas Ltda.

Rua Cyro C. Pereira, 550 - Curitiba- PR – Indústria Brasileira

CNPJ 21.551.379/0013-31

SAC 0800 0555654/cs_brasil@bd.com

Resp. Técnico: Luciana M. Pauka, CRF-PR 12541

Registro ANVISA nº 10033430030