

## DADOS TÉCNICOS

- Cilindro transparente confeccionado em polipropileno;
- Agulha acoplada removível confeccionada em aço inoxidável;
- Estéril;
- Oferece segurança, qualidade e conforto aos portadores de diabetes e profissionais da saúde;
- Capacidade nominal de 1mL para insulinas de concentração de 100U.I.;
- Graduação em unidades de insulina e intervalo de escala numerada a cada 10 unidades e graduada de 1 em 1 unidade;
- Lubrificadas, garantindo punção suave e reduzindo a pressão exigida durante a manipulação do dispositivo;
- Embaladas individualmente em filme termoplástico e em papel grau cirúrgico;
- A Seringa de Insulina Descartável Descarpack é indicada para aplicação de insulina pela via subcutânea e intradérmica em hospitais, clínicas, laboratórios, farmácias e domicílios;
- A Seringa de Insulina Descartável Descarpack atende as normas ABNT NBR ISO 8537: 2020, ABNT NBR ISO 594:2006, a Portaria do INMETRO nº 503 de 29 de dezembro de 2011 e a Resolução RDC nº 27 de 14 maio de 2014.

## MODELOS CADASTRADOS

<b>Modelo da Seringa</b>	<b>Tamanho da Seringa</b>	<b>Tamanho da Agulha</b>
Luer Slip	100 U.I/1 mL	13 x 0,45 mm

## **INSTRUÇÕES DE USO**

---

1. Identificar o material a ser utilizado durante a aplicação, de acordo com a orientação da receita médica;
2. Lavar as mãos antes de preparar a injeção;
3. Abrir a embalagem da seringa utilizando o local correto de abertura;
4. Retirar o protetor da agulha e aspirar o medicamento;
5. Realizar anti-sepsia do local da aplicação com algodão e álcool 70%;
6. Ao final da aplicação, descartar a seringa em local apropriado.

## **ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES**

---

- Antes de utilizar leia atentamente as instruções de uso;
- Verificar cuidadosamente a integridade de cada embalagem primária antes do uso;
- Não utilizar caso a embalagem primária esteja violada;
- Produto esterilizado com Óxido de Etileno;
- Proibido reprocessar;
- Validade assegurada por 5 anos enquanto a embalagem não for danificada ou molhada;
- Produto médico-hospitalar de uso único;
- Após o uso descartar em local apropriado.

## **CONTRAINDICAÇÕES**

---

Não aplicável.

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

As embalagens contendo os produtos devem ser armazenadas e transportadas em temperatura de 4 a 40°C, evitando exposição direta ao calor, luz e umidade.

A validade do produto é garantida enquanto as embalagens permanecerem

íntegras, dentro do prazo de validade estabelecido na rotulagem do produto. Para que isto aconteça, é preciso que os devidos cuidados de armazenagem e transporte sejam tomados.

## **CONDIÇÕES DE MANIPULAÇÃO**

---

Não informamos métodos de limpeza e desinfecção pois o produto é de reprocessamento proibido de acordo com a RE nº 2605/2006. O descarte deste produto deve ser feito imediatamente após a utilização. Sugere-se o descarte do produto em recipiente próprio para perfurocortantes (grupo E de acordo com a RDC 222/2018).

## **INFORMAÇÕES SOBRE O PRODUTO**

---

**Fabricante Responsável:** Lifelong Meditech PVT. LTD.

**Importado e Distribuído por:** Descarpack Descartáveis do Brasil Ltda

**Notificação Anvisa:** 10330669152

**Responsável Técnica:** Indianara D. Zanelato Joiozo – CRF/SP: 92269