

Dispositivo de atomização da mucosa

Nome técnico: Dispositivos

Modelo Comercial: MADgic (MAD700); MADgic (MAD720)

Apresentação comercial: Caixa com 25 unidades.

Rx ONLY



PROBIDO REPROCESSAR

INDICAÇÕES DE USO: Atomização de soluções tópicas nas membranas mucosas nasais e da orofaringe. O produto é para utilização transitória e colocado na cavidade orofaríngea mas não deve ser colocado dentro do traqueia. O produto somente pode ser utilizando em apenas um único paciente. O componente do fio de aço inoxidável tem a finalidade de fornecer firmeza à tubulação e lúmen duplo quando a tubulação está dobrada. Assim a tubulação pode manter sua forma quando o produto é utilizado. O fio de aço inoxidável não entre em contato com o usuário ou paciente.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO:

1. Preencha a seringa com o volume desejado de solução e elimine o ar restante.
2. Conecte o dispositivo nasal MADgic na seringa. Elimine o ar do tubo e dobre a extensão do tubo para a posição desejada. O tubo permanecerá na posição fixa.
3. Coloque a ponta do dispositivo nasal MADgic na cavidade da orofaringe.
4. Comprima o êmbolo da seringa para borrifar a solução atomizada na cavidade da orofaringe.

ADVERTÊNCIA: A utilização de produtos destinados ao uso em um único paciente em mais de um paciente pode resultar em desempenho degradado ou perda de funcionalidade e também pode resultar em exposição a infecções virais, bacterianas, fúngicas ou patógenos priônicas. Métodos e instruções validados de limpeza e esterilização para o reprocessamento não estão disponíveis para estes produtos. Este produto não se destina a ser limpo, desinfectado ou esterilizado. Proibido reprocessar.

COMPOSIÇÃO

Resina K, policarbonato, aço inoxidável 302, PVC sem DHEP, ciclohexanona.

CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto não possui condições especiais de armazenamento. É recomendável que o armazenamento seja realizado em local limpo, fresco, ao abrigo de luz e livre de contaminação

CONDIÇÕES DE TRANSPORTE

O produto não requer condições especiais de transporte. É recomendável que o produto seja transportado em local limpo, fresco, ao abrigo de luz e livre de contaminação.

DESCARTE

O descarte deve ser realizado de acordo com normas locais vigentes.

ESPECIFICAÇÕES:

TAMANHO TÍPICO DAS PARTÍCULAS	30-100 microns.
ESPAÇO MORTO DO SISTEMA	MAD700: 0,19 mL MAD720: 0,13 mL
DIÂMETRO DA PONTA	4,8 mm

COMPRIMENTO DO APLICADOR	MAD700: 21,6 mL MAD720: 11,4 mL
---------------------------------	------------------------------------

Importador:

Emergo Brazil Import Importação e Distribuição de Produtos Médicos Hospitalares Ltda.
Avenida Francisco Matarazzo, 1752 sala 502/503, Água Branca CEP: 05001-200 - Cidade: São Paulo / UF:SP CNPJ: 04.967.408/0001-98
BrazilVigilance@ul.com
Responsável Técnico: Luiz Levy Cruz Martins - CRF-SP: 42415
Registro Anvisa nº: 80117580370

Fabricante:

Teleflex Medical, Inc.
3015 Carrington Mill Boulevard, Morrisville NC 27560, Estados Unidos
Origem: México

Verifique no rótulo do produto a versão da instrução de uso correspondente. Não utilize instrução de uso com versão diferente daquela indicada no rótulo do produto.

Obtenha a Instrução de Uso através do endereço eletrônico: www.instrucoestelex.com.br

O formato impresso também poderá ser adquirido através do telefone de suporte sem custo adicional do seu distribuidor:

Distribuidor: Cirurgica DMG

Telefone de Suporte (Ligação a cobrar): 90 (número da operadora) 61 3340-7744

Nome de contato: Aline Silva

Distribuidor: Global Médica Comércio Atacadista de Material Médico-Hospitalar Ltda.

Telefone de suporte (Ligação a cobrar): 90 (número da operadora) 21 97484-6865

Nome de Contato: Luciana Affonso

Distribuidor: Quebec Comercial Ltda.

Telefone de Suporte (Ligação a cobrar): 90 (número da operadora) 85 98150-5153

Nome de Contato: Valdice Junior

Distribuidor: Badéia Comércio e Importação Ltda.

Telefone de suporte (ligação a cobrar): 90 (número da operadora) 11 2292-0474

Nome de contato: Francisco Orleudo Gomes de Lima e Rita de Cassia de Amorim Costa