

Cadastro / Registro M.S.:

10369460099

Modelos cadastrados:

LABORVACUUM III COM ADITIVO - GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO+ EDTA K2 OU K3 - Embalagem com 100 (cem) tubos. Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm –2,5mL, 3mL, 4mL e 5mL. Código de cor – CINZA.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - COAGULAÇÃO (CITRATO DE SÓDIO) - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 1,8mL, 2mL, 2,5mL, 2,7mL, 3,6mL, 4,0mL, 4,5mL e 5mL. Código de cor – AZUL.

LABORVACUUM III COM GEL SEPARADOR - Embalagem com 100 (cem) tubos (13 x 75)mm:–3,5mL, 4mL e 5mL - (13 x 100)mm: 5mL e 6mL - (16 x 100mm) - 8mL e 8,5mL. Código de cor – AMARELO.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - ESR - Embalagem com 100 (cem) tubos. (8 x 120)mm: 1,6mL - (9 x 120)mm: 1,6mL - (11 x 120)mm: 1,6mL- (13 x 75)mm – 1,6mL, 2,0mL, 2,5mL, 3,2mL e 5mL .Código de cor – PRETO.

LABORVACUUM III (SECO) - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 2mL, 3mL, 4mL e 5mL. (13 x 10)mm: 5mL - (16 x 100)mm: 9mL e 10mL. Código de cor – VERMELHO.

LABORVACUUM III COM ATIVADOR DE COÁGULO - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 2mL, 3mL, 4mL e 5mL. (13 x 10)mm: 5mL - (16 x 100)mm: 9mL e 10mL. Código de cor – VERMELHO.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - PLASMA (HEPARINA SÓDICA) - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75) mm: 2mL e 3mL - (13 x 100) mm: 5mL, 6mL, 7mL e 8mL. Código de cor – VERDE.

TUBO PARA COLETA DE SANGUE A VÁCUO LABORVACUUM III COM ADITIVO - GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO) - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 1,8mL – 2,0mL, 2,5mL, 4mL e 5mL. Código de cor – CINZA.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - GLICOSE (FLUORETO DE SÓDIO+OXALATO DE POTÁSSIO - mbalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 2,5mL, 3mL, 4mL e 5mL. Código de cor – CINZA.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - PLASMA (HEPARINA DE LÍTIO) - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75) mm: 2mL e 3mL - (13 x 100) mm: 5mL, 6mL, 7mL e 8mL. Código de cor – VERDE.

LABORVACUUM III COM ADITIVO-PLASMA (HEPARINA DE LÍTIO) COM GEL SEPARADOR - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75) mm: 2mL, 3mL e 5mL - (13 x 100) mm – 6mL e 7mL. Código de cor – VERDE.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - EDTA K2 ou K3 - Embalagem com 100 (cem) tubos. Dimensões e Volumes - (13 x 75) mm: 1,8mL, 2mL, 3mL, 4mL , 4,5mL e 5mL - (13 x 100) mm – 5mL e 7mL. Código de cor – ROXO.

LABORVACUUM III COM ADITIVO - EDTA K2 ou K3 COM GEL SEPARADOR - Embalagem com 100 (cem) tubos. (13 x 75)mm: 1,8mL, 2mL, 3mL, 4mL, 4,5mL e 5mL - (13 x 100)mm: 5mL e 7,0mL. Código de cor – ROXO.

Indicação de Uso:

O tubo para coleta de sangue a vácuo é utilizado para a coleta de sangue destinado a análises clínicas.

Instrução de uso:

- Sentar o paciente no posto de coleta o mais confortável possível.
- Instalar o garrote na parte superior do braço.
- Realizar assepsia no local com álcool a 70%.
- Efetuar a punção venosa, com o auxílio de adaptador para coleta.
- Coletar o sangue no tubo devidamente identificado e codificado de acordo com as normas do laboratório clínico.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- **Condições de armazenamento:** Conservar a temperatura entre 15° - 30°C.
- **Descarte:** Após o uso da amostra biológica, descartar o tubo devidamente identificado e codificado de acordo com as normas do laboratório clínico.

Advertência/Precaução:

Advertências:

- Se o sangue não fluir, verificar o local da punção, a agulha e o adaptador.
- Soltar o garrote.
- Reiniciar o procedimento desde o início.

Validade:

18 meses.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado/ Distribuído:

Importador:

Matriz: Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.

Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo – CRF/SP: 41067

Fabricante: AYSET PLASTIK, TEKSTIL VE ELEKTRONIK SANAYI A.S. - TURQUIA

Sarihamzali, 47007. Sk. 38-1, 01110 Seyhan/Adana, Turquia

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525