



## CATGUT CROMADO

**Descrição** - Os fios cirúrgicos de Catgut Cromado são de origem animal, composto de colágeno, derivado da serosa proveniente do intestino de gado bovino, tratados com sais de cromo. Fio de aspecto homogêneo e multifilamentar torcido. Absorção prolongada devido ao tratamento especial com sais de cromo. Possui alta resistência e fácil manuseio. Retenção da força tênsil “in vivo” aproximadamente 21-28 dias. O período de absorção é de aproximadamente 60 dias, sendo absorvido por processo digestivo enzimático proteolítico. Reação tecidual moderada. Esterilizado por Cobalto.

**Indicações** - Aproximação e/ou ligadura de tecidos moles em geral, incluindo uso em procedimentos oftalmológicos, ginecológicos, obstétricos, gastrointestinais, tecidos friáveis e fechamento geral.

**Contraindicações** - São contraindicados em cirurgias cardiovasculares e neurológicas.

**Apresentações** - Apresenta-se na coloração marrom com os números cirúrgicos 6-0 a 4 (vide tabela de preços), providos ou não de agulhas.

**Conservação** - Recomenda-se conservar à temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

**Apresentação** - A sutura Catgut Cromado é apresentada nos N<sup>os</sup> cirúrgicos de 9-0 a 4, métrico 0,4 a 8. Apresenta-se em comprimentos pré-estabelecidos, sem agulhas ou com uma ou duas agulhas de diferentes tipos.

**Instruções de Uso** - Deve ser utilizado de acordo com o procedimento cirúrgico, sendo definido por critério médico o tamanho e diâmetro do fio de sutura e da agulha utilizados para cada tipo de intervenção cirúrgica.

**Cuidados** - Este produto deve ser utilizado por cirurgiões treinados e com experiência em técnicas cirúrgicas. Recomenda-se o manuseio adequado para evitar danos ao material. Usar técnicas assépticas. Produto estéril, a menos que a embalagem seja aberta ou danificada. Produto não deve ser reesterilizado por se tratar de um artigo médico-hospitalar de uso único. O produto não deve ser utilizado para nenhum outro fim, senão aquele que especificamente se destina. Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada. Não utilizar caso a data de validade do produto esteja vencida. O produto uma vez extraído deve ser considerado lixo hospitalar de risco biológico. PROIBIDO REPROCESSAR. A empresa recomenda seguir o programa de gerenciamento de resíduos em caso de produto vencido ou avariado.

**Conservação** - Recomenda-se conservar a temperatura de 20 a 30°C, ao abrigo da luz solar, livre de poeira, umidade e intempéries, em sua embalagem original. Transportar em veículos fechados, que protejam o produto de sol e chuva.

**Validade** - A sutura de Catgut Cromado tem validade de 3 (três) anos, após a data de fabricação.

**CAIXA COM 12, 24 E/OU 36 ENVELOPES - PRODUTO DE USO ÚNICO - NÃO RE-ESTERILIZAR - ESTÉRIL - DESCARTAR ENVELOPES ABERTOS E NÃO UTILIZADOS - MÉTODO DE ESTERILIZAÇÃO: COBALTO.**

**SHALON FIOS CIRÚRGICOS LTDA.**

**FÁBRICA - AV. HERMÓGENES. COELHO, 3523 - ALTO DA BOA VISTA CEP 76100-000 - SÃO LUÍS DE MONTES BELOS – GO.**

Farmacêutica Responsável: DR<sup>a</sup> KÁTIA REGINA DO NASCIMENTO DIAS POLICARPO CRF-GO 11.307

**VENDAS - AV. C-255 N<sup>o</sup> 270, EDIFÍCIO CENTRO EMPRESARIAL SEBBA, SALAS: 602/603 NOVA SUIÇA - GOIÂNIA – GO - CEP: 74280-010. SAC.: (62)3259-4546. E-MAIL: vendas@sutura.com.br. CNPJ: 33.348.467/0001-86 – Indústria Brasileira.**

**Registro no Ministério da Saúde N<sup>o</sup> 10243410010 (Agulhado) e N<sup>o</sup> 10243410020 (Não Agulhado)**