

INSTRUÇÕES DE USO

A ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli informa que a instrução de uso a seguir se aplica ao seguinte modelo comercial: PEF121214LR.

EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS FOTOSSENSÍVEL - FORTECARE

Indicação de Uso: O equipo fotossensível da ForteCare é indicado para infusão gravitacional de soluções parenterais fotossensíveis.

Especificação:

Código interno	Descrição do Produto
PEF121214LR	Equipo Fotossensível macrogotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral.

Registro ANVISA: 80463910049

Fabricado por:
ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli
CNPJ: 08.474.646.0001/12
Travessa Pedro Pok, 570 - Rodovia BR 476, Km 18.
Colombo PR
Tel: (41) 3888 4460
Resp. Técnica: Christiane M. G. Hey
CRF-PR 21193

Produto estéril, apirogênico e atóxico. **Esterilizado a gás óxido de etileno.**

Instruções de uso:

1. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade e se a embalagem está íntegra.
2. Abrir a embalagem através de técnica asséptica.
3. Fechar o regulador de fluxo.
4. Retirar o protetor da ponteira e conectar o equipo na bolsa/frasco de solução.
5. Colocar o saco fotoprotetor no frasco/bolsa de solução.
6. Conectar a extremidade distal do equipo no dispositivo de acesso ao paciente.
7. Ao término da infusão, descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

⚠️ PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. DESTRUIR APÓS O USO.

- Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade.
- Use sempre técnica asséptica quando manusear o produto.
- Produto estéril, a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Somente conectar em sonda nasogástrica ou enteral.

Prazo de validade: 36 meses se a embalagem estiver íntegra.

Armazenamento e transporte: Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C, evitando a exposição direta à luz solar e à umidade elevada

