

INSTRUÇÕES DE USO DO PRODUTO

1. Produto: Seringa Estéril de uso único para Insulina com agulha - SR INSUFINE.

2. Registro MS: 80026180015

3. Instruções de uso.

Para garantir a esterilidade do medicamento e dos materiais utilizados, são necessários cuidados que vão desde a lavagem das mãos até o preparo final da seringa.

- Verificar a integridade do produto antes do uso.
- Destacar a unidade do produto da cartela.
- Abrir a embalagem através da técnica asséptica, pela pétala de abertura, para evitar o risco de contaminação.
- Retirar a seringa da embalagem pegando pela base do êmbolo;
- Observar que existe um espaço entre o êmbolo e a escala zero da seringa, pressionar o êmbolo levemente simulando uma aplicação para ocorrer o destravamento da seringa.
- Movimentar suavemente o êmbolo ao longo do corpo do cilindro para lubrificação de toda área interna do cilindro, isso facilitará o procedimento de aspiração;
- Retirar o protetor da agulha;
- Realizar o procedimento conforme técnica adequada;
- Após o uso descartar em local adequado para perfuro cortantes.

Para descartar o material deve-se seguir procedimentos internos do local de trabalho, atentando-se para algumas instruções básicas:

- Descartar seringas e agulhas em locais identificados para este fim (coletores próprios);
- As agulhas não devem ser desconectadas da seringa;
- As agulhas normalmente não devem ser reencapadas, podendo ser utilizados protetores automáticos de agulhas existentes no mercado, para proteger os usuários;
- Cadastrar-se no sistema de lixo hospitalar de sua cidade para a coleta do lixo;
- Procurar seguir as várias normas referentes ao gerenciamento de lixo hospitalar.



Saldanha Rodrigues Ltda.

Av. Torquato Tapajós nº 2475 – Flores – CEP 69058-830 – Manaus-AM / Brasil
CNPJ: 03.426.484/0001-23 / Insc. Est.: 06.200.183-3 / Insc Suframa: 20068301-2
Fones: Geral (92) 2125-6000 - Fax (92) 2125-6020 - Vendas (92) 3654-4416
E-mail: seringasr@seringasr.com.br

4. Fabricante.

SALDANHA RODRIGUES LTDA	
Avenida Torquato Tapajós, nº 2475 – Bairro Flores	CEP: 69.058-830
CNPJ: 03.426.484/0001-23	Inscrição Estadual: 06.200.183-3
Inscrição SUFRAMA: 20068301-2	
E-mail: vendas@seringasr.com.br	
Central de Relacionamento com o Cliente: qualidade@seringasr.com.br	