

## INSTRUÇÃO DE USO

### 1) NOME COMERCIAL

Hemospon – Esponja Hemostática de Gelatina

### 2) DESCRIÇÃO

Hemospon é uma esponja hemostática de gelatina liofilizada. Hemospon tem ação hemostática, cicatrizante e é completamente absorvível pelo organismo em um período de aproximado de 2 a 8 semanas. Hemospon é atóxico e apirogênico. Apresenta-se pronto para uso.

É embalado em blisters ou envelopes individuais. O produto é apresentado estéril, sendo a esterilização feita por radiação gama.

### 3) INDICAÇÃO DE USO

Hemospon é indicado durante e após procedimentos cirúrgicos para obtenção de hemostasia local, principalmente quando o controle do sangramento por métodos convencionais for ineficaz.

Em procedimentos cirúrgicos odontológicos, Hemospon, além de proporcionar a hemostasia, também tem as seguintes finalidades:

- Hemospon 1,0 x 1,0 x 1,0cm: atua na manutenção do coágulo e no preenchimento dos espaços gerados nas extrações dentárias convencionais, remoções de dentes inclusos ou impactados, remoções de cistos ou tumores, biópsias, etc.

-Hemospon Cote e Hemospon Tape: proteção de feridas produzidas durante procedimentos odontológicos, tais como cirurgias periodontais, fechamento de áreas de enxertos e em cirurgias do seio maxilar.

### 4) APRESENTAÇÃO

Hemospon 1,0 x 1,0 x 1,0cm – Embalagem contendo 10 unidades ou 40 unidades

Hemospon Cote 2,0 X 4,0cm - Embalagem contendo 1 unidade

Hemospon Tape 2,5 X 7,5cm - Embalagem contendo 1 unidade

Hemospon Standard 70 X 50 x 10 mm - Embalagem contendo 1 unidade

Hemospon Standard 80 X 50 x 10 mm - Embalagem contendo 1 unidade

Hemospon Size 125 X 80 x 10 mm - Embalagem contendo 1 unidade

### 5) COMPOSIÇÃO

Gelatina porcina

### 6) MODO DE USO

Retirar Hemospon da embalagem, utilizando uma técnica asséptica.

Se houver necessidade, a esponja pode ser recortada no tamanho desejado.

Aplicar Hemospon diretamente na área onde se requer a hemostasia, exercendo ligeira pressão.

O produto pode ser utilizado seco ou, opcionalmente, umedecido em solução salina estéril.

O período de tempo necessário para hemostasia varia de acordo com a intensidade do sangramento.

Uma vez que se tenha obtido a hemostasia, Hemospon pode ser removido, substituído ou deixado no local até a sua completa absorção, que acontece em um período de 15 dias.

### 7) ADVERTÊNCIA e PRECAUÇÃO

Uso Profissional exclusivo

Quando aplicada em cavidades ou espaços fechados, verificar se a quantidade do material não é excessiva a ponto de pressionar estruturas nobres vizinhas.

Hemospon deve ser manipulado com pinças ou tesouras esterilizadas.

Hemospon é apresentado estéril e não pode ser re-esterilizado.

Antes do uso, inspecionar a embalagem. Não utilizar se a embalagem estiver violada.

#### 8) CONTRAINDICAÇÃO

Não é recomendado o uso de esponjas em áreas infectadas ou contaminadas.

As esponjas também não devem ser utilizadas em fechamentos de incisões cutâneas, pois podem interferir com a cicatrização dos bordos da ferida.

#### 9) EFEITO ADVERSO

Não existe relato de nenhum efeito adverso para o produto utilizado corretamente para a sua finalidade.

#### 10) CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

O produto deve ser conservado em temperatura ambiente, entre 15°C e 30°C, em sua embalagem original, protegido da umidade.

#### 11) PRAZO DE VALIDADE

2 anos a partir da data de fabricação

#### 12) MODO DE DESCARTE

Não reutilizar o produto e descartar de acordo com a legislação local, assegurando a sua completa descaracterização a fim de impedir a sua reutilização e danos ambientais.

#### 13) DIZERES LEGAIS

Maquira Indústria de Produtos Odontológico S.A.

End: Av. Melvin Jones 773 Pq. Industrial bandeirantes

Maringá - Paraná





CEP: 87070-030







Responsável Técnico: Kellen Dib de Campos

CRF-PR 15.807

Reg. ANVISA: 80322400100

#### 14) SIMBOLOGIA

	Não re-utilize
	Fabricante
	Atenção, leia a Instrução de Uso
	Consulte as Instruções de Uso

	Data de validade
	Número de catálogo
	Número de lote
	Manter longe da luz solar
	Manter afastado da chuva
	Limite de Temperatura