



## CURATIVO TRANSPARENTE VITALDERME

**REGISTRO ANVISA** 10296900073

### INSTRUÇÕES DE USO

- 01 - Limpar adequadamente a ferida, conforme rotina e técnicas assépticas
- 02 - Escolher o modelo e tamanho correto que deverá ser 02 cm maior que a área pretendida;
- 03- Abra o envelope e retire o curativo estéril;
- 04 - Remover a película protetora evitando contato com sua parte interna para não o contaminar.
- 05- Posicionar o curativo sobre o local da punção e pressionar de forma suave do centro para a extremidade de todo o curativo para que a parte adesiva fixe na pele;
- 06 - Para os modelos com fixador em abas, levante a aba e passe a extensão ou tubo para melhor fixação.
- 07 – Para remover o curativo, levantar cuidadosamente uma de suas extremidades, mantendo-o pressionado contra a pele.
- 08- Proceder deste modo, até que todas as extremidades deixem de estar em contato com a pele.
- 09-Os curativos podem ser mantidos durante o banho, desde que mantenham completa aderência na região aplicada;
- 10- Os curativos podem permanecer até 07 dias devendo ser trocado de acordo com as indicações do profissional de saúde habilitado e conforme protocolo da instituição.

### ADVERTÊNCIAS E PRECAUÇÕES

Artigo hospitalar de pronto uso.

Produto Estéril – Esterilizado por oxido de etileno.

Respeitar o prazo de validade

Em caso de alergias, descontinuar o uso do produto.

Se a embalagem estiver violada, não usar o produto.

O produto deve ser usado imediatamente após a abertura da embalagem.

O curativo não poderá ser utilizado sobre feridas abertas.



A permanência do mesmo curativo não poderá ser superior a 7 dias.

Este produto destina – se a ser utilizado por profissional habilitado e treinado.

O produto deve ser descartado seguindo normas e rotinas da instituição de saúde.

Produto com reprocessamento proibido, tendo em vista que a especificações técnicas do produto há impossibilidade de reprocessar devido a perda de funcionalidade e integridade do mesmo.

#### **ATENÇÃO:**

Tempo De Uso: aconselha-se a troca a cada 7 dias e/ou em caso de sinais flogísticos, alterações do aspecto da ferida ou pele, tais como hiperemia, acúmulo de fluidos sob o curativo, sangramento, irritação cutânea, descolamento do mesmo.

#### **ARMAZENAMENTO, CONSERVAÇÃO E TRANSPORTE**

O armazenamento deverá ser feito em local apropriado, com temperatura e umidade controlada, em pallets ou prateleiras para que não haja contato direto com o piso e distante das paredes para a ventilação e limpeza adequadas. O transporte deverá ser feito por empresa regularizada para essa atividade, ou seja, transporte de produtos para a saúde, sempre ao abrigo do calor e da luz e mantendo em local fresco e seco. Não transportar com outro tipo de produto que não seja material médico-hospitalar.

#### **IMPORTADO E DISTRIBUÍDO POR**

JoãoMed Comércio de Materiais Cirúrgicos S.A. | CNPJ 78.742.491/0001-33

Rua Wilson Lois Koehler Jr., 406 - Xaxim - CEP 81630-280 - [www.joaomed.com.br](http://www.joaomed.com.br)

Curitiba - Paraná – Brasil – Tel.: (41) 2108-4545 - SAC: 0800 701 2006

#### **IMAGENS ILUSTRATIVAS DO PRODUTO**



Sem janela



Com janela