

INSTRUÇÕES DE USO

A ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli informa que a instrução de uso a seguir se aplica aos seguintes modelos comerciais: PEG121214, PEG121214LR, PEG121214LRF, PEG122214LR, PEG161210, PEG161214, PEG161214LR e PEG1212123LR.

EQUIPO PARA INFUSÃO DE SOLUÇÕES PARENTERAIS – FORTECARE

Indicação de Uso: Os equipos parenterais da ForteCare são indicados para infusão gravitacional de soluções parenterais.

Especificação:

Código interno	Descrição do Produto
PEG121214	Equipo Macrogotas com conector luer slip, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral.
PEG121214LR	Equipo Macrogotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral.
PEG121214LRF	Equipo Macrogotas com conector luer lock, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral.
PEG122214LR	Equipo Microgotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral.
PEG161210	Equipo Macrogotas com conector luer slip, tubo de PVC, pinça rolete e filtro de solução.
PEG161214	Equipo Macrogotas com conector luer slip, tubo de PVC, pinça rolete, filtro de solução e injetor lateral.
PEG161214LR	Equipo Macrogotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, filtro de solução e injetor lateral.
PEG1212123LR	Equipo Macrogotas com conector luer lock rotatório, tubo de PVC, pinça rolete, entrada de ar, filtro de solução e injetor lateral needle free.

Produto estéril, apirogênico e atóxico. **Esterilizado a gás óxido de etileno.**

Instruções de uso:

1. Verificar se o produto está dentro do prazo de validade e se a embalagem está íntegra.
2. Abrir a embalagem através de técnica asséptica.
3. Fechar o regulador de fluxo.
4. Retirar o protetor da ponteira e conectar o equipo na bolsa/frasco de solução.
5. Conectar a extremidade distal do equipo no dispositivo de acesso ao paciente.
6. Ao término da infusão, descartar em local apropriado.

Precauções, Restrições, Advertências e Cuidados Especiais

! PRODUTO DE USO ÚNICO. PROIBIDO REPROCESSAR. DESTRUIR APÓS O USO.

- Somente utilizar se o produto estiver íntegro e dentro do prazo de validade.
- Use sempre técnica asséptica quando manusear o produto.
- Produto estéril, a menos que a embalagem esteja danificada ou tenha sido aberta.
- Somente conectar em sonda nasogástrica ou enteral.

Prazo de validade: 36 meses se a embalagem estiver íntegra.

Armazenamento e transporte: Armazenar a temperaturas entre 5°C e 35°C, evitando a exposição direta à luz solar e à umidade elevada



Registro ANVISA: 80463910043

Fabricado por:

ForteCare Indústria de Produtos Médicos Eireli

CNPJ: 08.474.646.0001/12

Travessa Pedro Pok, 570 - Rodovia BR 476, Km 18.

Colombo PR

Tel: (41) 3888 4460

Resp. Técnica: Christiane M. G. Hey

CRF-PR 21193

