

DESCRIÇÃO

Suturas agulhadas, não absorvíveis, com fio de nylon de origem sintética, monofilamentar de poliamida 6 (PA 6.6), nos comprimentos de 30cm, 45cm, 75cm e 150cm e nos diâmetros de número cirúrgico (USP) 1, 0, 2-0, 3-0, 4-0, 5-0, 6-0 e 10-0, na cor preta.

AÇÕES

Efetuar o fechamento de incisões cirúrgicas, auxiliando o processo de cicatrização dos tecidos.

INDICAÇÕES

Efetuar o fechamento de incisões cirúrgicas, auxiliando o processo de cicatrização dos tecidos. Indicado para procedimentos cirúrgicos cuticulares e oftalmológicos.

CONTRAINDICAÇÕES

As suturas de Nylon BC Suture não são indicadas para utilização em feridas com alto grau de contaminação microbiológica.

ADVERTÊNCIAS

Não utilizar o produto para outros fins além daqueles recomendados pelo fabricante.

Não utilizar se a embalagem estiver molhada, violada ou danificada.

Não utilizar se a data de validade do produto estiver vencida.

Recomenda-se que a embalagem seja aberta imediatamente antes do uso para minimizar a possibilidade de contaminação, medidas cautelares devem ser tomadas para que seja feito sempre de modo asséptico.

O envelope grau cirúrgico garante a esterilidade do produto, desde que não aberto ou danificado.

As embalagens não devem ser autoclavadas.

Uso exclusivo por profissionais de saúde devidamente habilitados no fechamento de tecidos em cirurgia.

O produto deve ser retirado após a cicatrização dos tecidos.

Artigo médico de uso único: não deve ser reesterilizado.

Produto não fervível.

Proibido reprocessar.

Produto estéril.

PRECAUÇÕES E ORIENTAÇÕES ADEQUADAS PARA USO CORRETO E SEGURO DO PRODUTO

É recomendável que os usuários estejam familiarizados com os procedimentos e técnicas cirúrgicas.

Evitar amassar ou enrugar o produto ao usar junto com instrumentos cirúrgicos.

Escolha o porta-agulhas de forma apropriada para a agulha, um produto de qualidade e desenho adequado.

Prenda a agulha em uma área de 1/3 a 1/2 de distância entre a extremidade encastrada e a ponta da agulha, de modo a ficar segura pela ponta da pinça. Ao puxar a agulha após a passada pelo tecido, tome cuidado para não lesar sua ponta, segure-a o mais próximo possível da posição inicial. Deve-se ficar atento quando a agulha do produto estiver sendo manuseada a fim de evitar perfurações indesejáveis. A força aplicada para introduzir a agulha no tecido deve ser na mesma direção de seu corpo. A espessura do tecido a ser suturado deve ser proporcional ao tamanho da agulha. Não faça torções ou força excessiva para transpassar a agulha, retire do tecido e refaça a passada. Se necessário, laçadas adicionais podem ser feitas, dependendo da capacidade do cirurgião e do nível de complexidade do procedimento. Agulhas com pontas gastas ou danificadas de qualquer forma devem ser substituídas. Não é recomendável fazer a aproximação dos tecidos usando a agulha. Não prenda a agulha com muita pressão, com pinças afiadas ou defeituosas, pois elas podem avariar a agulha com maior propensão à quebra ou dobras. Utilize a agulha correta para cada tipo de tecido e ao suturar tecidos em áreas confinadas ou mais profundas, proceda com cautela.

REAÇÕES ADVERSAS

Não se aplica

INSTRUÇÕES DE USO

Aplica-se nas bordas das incisões cirúrgicas, utilizando as técnicas segundo critério médico.

A utilização deste produto deverá estar de acordo com os procedimentos cirúrgicos aplicáveis para sutura monofilamentar não absorvível, considerando-se a área de aplicação.

Cuidado na aplicação: Tensionar antes de usar, não esmagar ou deformar o fio de sutura ao utilizar o porta-agulhas.

FORMAS DE APRESENTAÇÃO

As suturas de NYLON BC SUTURE estão disponíveis em cartuchos contendo de 1 a 120 envelopes.



NYLON BC SUTURE

R.M.S.: 10426020023

ARMAZENAGEM E TRANSPORTE

Armazenar em ambiente seco e fresco, livre da luz solar direta e de umidade.

VALIDADE

Válido por 05 anos a partir da data de fabricação, se mantida a integridade da embalagem.

ESTERILIZAÇÃO

Esterilizado por Óxido de Etileno ou Cobalto 60.

PRODUZIDO POR:

BIOLINE FIOS CIRÚRGICOS LTDA

CNPJ: 37.844.479/0001-52

Avenida Maranhão, nº 500, Bairro Jundiáí, CEP: 75.110-470

Anápolis - Goiás - Brasil

Tel.: 55 (62) 3324-2120, 3703-2200

Fax: 55 (62) 3324-3072, 3703-2224/2225

Site: www.biolinefios.com.br

E-mail: sac@biolinefios.com.br

R.T / T.R: Alexandre Faria Vasconcelos - CRQ XII – 12200147

Indústria Brasileira