

Cadastro / Registro M.S.:

10369460190

Modelos cadastrados:

0.33 mm x 8 mm (29G x 5/16"), 0.33 mm x 13 mm (29G x 1/2), 0.33 mm x 20 mm (29G x 3/4"), 0.33 mm x 25 mm (29G x 1"), 0.33 mm x 30 mm (29G x 1 1/4"), 0.33 mm x 40 mm (29G x 1 1/2"), 0.38 mm x 8 mm (27.5G x 5/16"), 0.38 mm x 13 mm (27.5G x 1/2"), 0.38 mm x 20 mm (27.5G x 3/4"), 0.38 mm x 25 mm (27.5G x 1"), 0.38 mm x 30 mm (27.5G x 1/4"), 0.38 mm x 40 mm (27.5G x 1 1/2"), 0.45 mm x 8 mm (26G x 5/16"), 0.45 mm x 13 mm (26G x 1/2"), 0.45 mm x 20 mm (26G x 3/4"), 0.45 mm x 25 mm (26G x 1"), 0.45 mm x 30 mm (26G x 1 1/4"), 0.45 mm x 40 mm (26G x 1 1/2"), 0.5 mm x 8 mm (25G x 5/16"), 0.5 mm x 13 mm (25G x 1/2"), 0.5 mm x 20 mm (25G x 3/4"), 0.5 mm x 25 mm (25G x 1), 0.5 mm x 30 mm (25G x 1 1/4"), 0.5 mm x 40 mm (25G x 1 1/2"), 0.55 mm x 8 mm (24G x 5/16"), 0.55 mm x 13 mm (24G x 1/2"), 0.55 mm x 15 mm (24G x 9/16"), 0.55 mm x 20 mm (24G x 3/4"), 0.55 mm x 25 mm (24G x 1"), 0.55 mm x 30 mm (24G x 1/4"), 0.55 mm x 40 mm (24G x 1 1/2"), 0.6 mm x 8 mm (23G x 5/16"), 0.6 mm x 13 mm (23G x 1/2"), 0.6 mm x 20 mm (23G x 3/4"), 0.6 mm x 25 mm (23G x 1"), 0.6 mm x 30 mm (23G x 1/4"), 0.6 mm x 40 mm (23G x 1 1/2"), 0.7 mm x 8 mm (22G x 5/16"), 0.7 mm x 13 mm (22G x 1/2"), 0.7 mm x 20 mm (22G x 3/4"), 0.7 mm x 25 mm (22G x 1"), 0.7 mm x 30 mm (22G x 1 1/4"), 0.7 mm x 40 mm (22G x 1 1/2"), 0.8 mm x 8 mm (21G x 5/16"), 0.8 mm x 13 mm (21G x 1/2"), 0.8 mm x 20 mm (21G x 3/4"), 0.8 mm x 25 mm (21G x 1"), 0.8 mm x 30 mm (21G x 1 1/4"), 0.8 mm x 40 mm (21G x 1 1/2"), 1.1 mm x 8 mm (19G x 5/16"), 1.1 mm x 13 mm (19G x 1/2"), 1.1 mm x 20 mm (19G x 3/4"), 1.1 mm x 25 mm (19G x 1"), 1.1 mm x 30 mm (19G x 1 1/4"), 1.1 mm x 40 mm (19G x 1 1/2"), 1.2 mm x 8 mm (18G x 5/16"), 1.2 mm x 13 mm (18G x 1/2"), 1.2 mm x 20 mm (18G x 3/4"), 1.2 mm x 25 mm (18G x 1"), 1.2 mm x 30 mm (18G x 1 1/4"), 1.2 mm x 40 mm (18G x 1 1/2")

Indicação de Uso:

As Agulhas Hipodérmicas Solidor® são usadas durante os procedimentos médicos cirúrgicos ou ambulatoriais. Destina-se à injeção de substâncias medicamentosas ou coleta sanguínea com finalidade de diagnóstico in vitro.

Instrução de uso:

Para utilização correta e segura, deve-se adotar os seguintes procedimentos:

1. Verificar a integridade do produto e a integridade de cada embalagem primária antes do uso, só abri-la no local adequado e em condições assépticas de manipulação.
2. Selecionar o modelo e tamanho apropriado da Agulha Hipodérmica Solidor®.
3. Cuidadosamente, selecionar e limpar o local no paciente a ser introduzido o dispositivo. A assepsia pode ser feita com qualquer solução germicida (Álcool, polvidine, clorexidina, etc).
4. Abrir a embalagem de forma asséptica e encaixe a agulha na seringa.
5. Levar o instrumento até o local a ser utilizado o procedimento.
6. Realizar o procedimento.
7. Após a realização do procedimento não encape novamente a agulha ainda na seringa. Descarte-a em caixa para material perfuro-cortante potencialmente infectados.

Importante: não há incompatibilidade dos produtos com nenhum medicamento ou solução que se pretenda utilizar, não há evidência de complicações provocadas pelo produto desde quando esteja garantido quanto à sua toxicidade (matéria-prima), esterilidade e apirogenicidade.

Conservação, Armazenamento e Transporte:

- As agulhas devem ser transportados de forma a impedir qualquer dano ou alteração em sua embalagem.
- Não pisar ou apoiar qualquer nas caixas para não danificar a embalagem e evitar contaminação consequente.
- Em todas as áreas de estocagem o artigo deve ser armazenado de forma a manter seu acabamento e não danificar sua embalagem. Armazenar em estantes de armação metálica ou vidro, com altura mínima do solo, possibilitando assim a limpeza diária.
- O produto deve ser armazenado em local seco e fresco. Protegido de calor excessivo e da luz solar direta.

Advertência/Precaução:

- Não usar o produto caso seja constatada a violação da integridade do invólucro, ou do seu conteúdo.
- Todos os procedimentos ligados à manipulação do produto devem ser cercados dos maiores cuidados, de modo a se evitar qualquer contaminação.
- O produto somente poderá ser operado por profissional com habilitação definida, familiarizado com as técnicas.
- O produto deve ser utilizado apenas uma vez, não se é permitido o seu reaproveitamento ou reesterilização.

- Usar as agulhas hipodérmicas imediatamente após a abertura da embalagem.
- Não utilizar o produto fora do prazo de validade.
- O produto deve ser usado de acordo com as instruções de uso.

Validade:

5 anos.

Contraindicação:

Não se aplica.

Importado e Distribuído:**Importador:**

Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda

Rua Padre Damaso, 165, 173 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

CNPJ: 01.005.728/0001-79

Filial: CNPJ: 01.005.728/0011-40

SAC: 0800 6658007

Resp. Técnica: Luciana J. Lanzillo - CRF: 41067

Fabricante:

Anhui Easyway Medical Supplies CO., LTD

Nº 8 Tianfeng Road, Yongfeng Industry Area, Tianchang Anhui - China

Versão I resumida para divulgação no site da ANVISA em cumprimento a RDC nº 431/2020.

Labor Import © - Todos direitos reservados.

CNPJ: 01.005.728/0001-79 | Inscrição Estadual: 492.315.879.112 | Sede: Rua Padre Damaso,165, 173, 187 | Osasco - SP | CEP: 06016-010 | Fone/SAC: (11) 3652-2525