

## Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000 Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814  
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

### FINALIDADE

O Cateter Tipo Óculos é indicado para administrar oxigênio sempre que houver insuficiência respiratória. A administração de oxigênio medicinal com finalidade terapêutica é empregada quando o paciente requer uma concentração média ou baixa de Oxigênio, onde esse é introduzido através da nasofaringe.

### FORMAS DE APRESENTAÇÃO DO PRODUTO:

Cateter Tipo Óculos é embalado individualmente, em pouch que apresenta em um dos lados papel grau cirúrgico e do outro filme em polietileno/polipropileno, vedado pôr termo selagem e esterilizado por oxido de etileno.

### CATETER TIPO ÓCULOS N°

08 10

### MODO DE USO:

- O procedimento com o Cateter Tipo Óculos deve ser realizado por um profissional habilitado com domínio da técnica;
- Retirar o produto da embalagem utilizando técnicas assépticas;
- Medir, com o cateter tipo óculos, a distância entre a base do nariz e o lóbulo da orelha, marcando com o adesivo, para determinar quanto o cateter deve ser introduzido. Introduzir o cateter pelo assoalho de uma das narinas, até o ponto marcado. Observar a posição do cateter através da boca do paciente – o extremo do cateter deve aparecer atrás da úvula palatina. Se ultrapassá-la, poderá ocorrer náuseas
- Conectar ao cilindro de oxigênio;

### PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Este produto destina-se a ser utilizado por profissionais habilitados e devidamente treinado na técnica própria à ser utilizada.
- A escolha e as orientações quanto ao uso do cateter devem ser realizadas pelo médico.
- A conexão entre o tubo de PVC e os conectores deve suportar as condições normais de uso do produto.
- O produto deve ser armazenado em local seco, arejado e longe do contato do solo, protegido de forma a evitar danos a embalagem.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem furos, quebras, rebarbas, componentes soltando, presença de material estranho.
- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada, úmida deve estar impresso o numero do lote legível, não devendo ser usado fora do prazo de validade. Fazer revezamento das narinas a cada 8 horas
- O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.
- Produto de uso único estéril e apirogenico. Deve ser descartado após o uso. Não podendo ser reutilizado.

### CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

<b>REGISTRO ANVISA/MS N°</b> 8.02860.0.0007 II - MEDIO RISCO <b>Responsável Técnico:</b> <b>SONIVAN FELIX DE</b> <b>ABREU</b> CRQ: IX 09.301988 -PR	<b>FABRICADO POR:</b> <b>Medplast Importação e Exportação de Produtos Hospitalares LTDA.</b> Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, Km 11,8 CNPJ: 77.995.615/001-04 <b>DISTRIBUIDO POR:</b> <b>Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.</b> Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin. CEP 84.990-000 - Arapoti – PR, Email: sac@biosani.net.br Telefone: (0xx43) 3557 – 4814 / CNPJ: 06.143.681/0001-23	<b>ESTERILIZADO POR</b> <b>OXIDO DE ETILENO</b>  <b>Lote:</b> <b>Fabricação:</b> <b>Validade:</b>
---	---	--