



MANUAL DE INSTRUÇÕES DE USO

LUVA PARA PROCEDIMENTO NÃO CIRÚRGICO DE LÁTEX COM PÓ



Nome técnico: Luvas descartáveis

Nome comercial: Luva para procedimento não cirúrgico de látex com pó

Importador:

INOVEN COMÉRCIO INTERNACIONAL LTDA.

Rua João Thomaz Pinto, 1570, Galpão 1, Módulo 1, Condomínio Byblos, Canhanduba

CEP: 88.313-045 – Itajaí/SC

CNPJ: 07.826.504/0001-04

Responsável técnica: Carolini Gardini

CRF/SC: 12011

Cadastro do produto perante ANVISA: 82090610008

CA: 45.834

1. DESCRIÇÃO DO PRODUTO

Luva para procedimento não cirúrgico em látex com pó, de uso único, ambidestra, superfície lisa, não estéril, atóxica, apirogênica, uso único.

2. INDICAÇÕES DE USO

As luvas de látex para procedimento não cirúrgico são utilizadas para proteção das mãos do usuário contra agentes biológicos como sangue, secreções e outros fluídos corporais, durante exames, procedimentos médicos, evitando assim possíveis contaminações durante os procedimentos.

3. INSTRUÇÕES DE USO

Para utilização do produto, realizar assepsia prévia das mãos; Calçar as luvas cuidadosamente com as mãos secas; Executar o procedimento; Após o uso, retirar a luva descartando-a imediatamente em local para materiais potencialmente contaminados; Não reutilizar ou esterilizar a luva após seu uso.

4. PRECAUÇÕES E ADVERTÊNCIAS

- Não utilizar se a embalagem estiver aberta ou danificada.



- Eliminar o produto em recipiente adequado, de acordo com a legislação federal, estadual e municipal vigente. Pode ser incinerado por empresas adequadas e regulamentadas, desde que os regulamentos sejam respeitados.
- Não utilizar após o prazo de validade.
- Evitar a exposição de fontes de calor em todo o tempo.
- Este produto contém látex de borracha natural.
- Seu uso pode causar reações alérgicas em pessoas sensíveis.
- Produto de uso único;
- Destruir após o uso;
- Proteja este produto do calor, da umidade e da luz.
- Produto não estéril.

5. CONDIÇÕES DE ARMAZENAMENTO

Manter o produto em local seco e fresco para preservar a qualidade e integridade do produto antes do uso. Armazenar e transportar em local protegido do calor, umidade e luz, protegendo da exposição direta do sol e da luz UV.

6. VALIDADE

05 anos após a data de fabricação – caso não haja violação da embalagem.

7. IMAGENS DO PRODUTO

Imagem 01: Luva para procedimento não cirúrgico de látex com pó





8. ROTULAGEM

Embalagem primária: em papel cartão contendo 100 unidades de luvas.

Embalagem secundária: em caixa de papelão contendo 10 cartuchos de embalagem primária cada, totalizando 1000 unidades.