

Biosani Indústria e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda.



Av: Thereza de Souza Carneiro, 1327, Distrito Industrial Hugo Parin, CEP: 84990-000
Arapoti-PR, Insc. Estadual: 903034785, CNPJ: 06.143.681/0001-23, Tel: (43) 3557-4814
Emails: qualidade@biosani.net.br / sac@biosani.net.br

FINALIDADE:

O Equipamento Multivias Biosani é utilizado como intermediário para infusão de duas ou mais soluções parenterais, através do princípio da ação da gravidade, compatível com o uso de equipamento para aplicação de solução parenteral, cateteres e scalpels.

MODO DE USO:

- A escolha quanto ao uso do equipamento Multivias Biosani deve ser feita pelo médico.
- Retirar o produto da embalagem utilizando técnica asséptica;
- Certificar-se de que não há ocorrências de bolhas de ar durante a passagem da solução;
- Se o equipamento Multivias Biosani apresentar corte de fluxo verificar se o mesmo permite a interrupção do fluxo da solução entre zero e o máximo;
- Se o equipamento apresentar injetor lateral este deve suportar a introdução da agulha no local adequado e sua completa vedação quando da retirada da mesma.
- Adaptar o equipamento ao paciente conforme técnica médica;

PRECAUÇÕES, RESTRIÇÕES, ADVERTÊNCIAS, CUIDADOS ESPECIAIS E ESCLARECIMENTOS SOBRE O USO DO PRODUTO:

- O produto não apresenta riscos desde que observada a sua correta utilização de acordo com técnicas médicas.
- Somente utilizar o produto se a embalagem estiver íntegra e dentro do prazo de validade.
- Produto Estéril e de uso único. Deve ser descartado após o uso.
- Usar o produto somente quando todos os seus componentes estiverem integralmente constituídos, sem quebras, rebarbas, componentes se soltando e presença de material estranho, etc.
- A embalagem deve estar perfeitamente lacrada, não podendo estar: danificada, perfurada ou mesmo úmida.
- O produto não pode apresentar vazamentos durante o uso, no caso desta ocorrência substituir o produto.

CONDIÇÃO DE ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE:

- Manter em local seco, limpo e em temperatura ambiente.

<p>REGISTRO ANVISA/MS Nº 8.02860.0.0040 II - MEDIO RISCO Responsável Técnico: SONIVAN FELIX DE ABREU CRQ: IX 09.301988 -PR</p>	<p>FABRICADO POR: Medplast Importação e Exportação de Produtos Hospitalares LTDA. Rod. Dep. João Leopoldo Jacomel, Km 11,8 CNPJ: 77.995.615/001-04 DISTRIBUIDO POR: Biosani Ind. e Comércio de Produtos Médicos e Odontológicos Ltda. Avenida Thereza de Souza Carneiro, 1327 – Distrito Industrial Hugo Parin. CEP 84.990-000 - Arapoti – PR Email: sac@biosani.net.br Telefone: (0xx43) 3557 – 4814 CNPJ: 06.143.681/0001-23</p>	<p>ESTERILIZADO POR OXIDO DE ETILENO</p> <p>Lote: Fabricação: Validade:</p>
---	--	---