

### Cadastro / Registro M.S.:

10369460065

### Modelos cadastrados:

- L2 - Câmara macrogotas com filtro, conexão de duas vias (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L6 - Câmara microgotas com filtro, conexão de duas vias (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L11 - Câmara macrogotas com filtro, simples, flash ball, regulador de fluxo e entrada de ar; L22 - Câmara microgotas tipo bureta, 150mL, clamp, com válvula, com membrana de injeção, regulador de fluxo e entrada de ar.
- L2R - Câmara Macrogotas com filtro, conexão em (Y), regulador de fluxo e entrada de ar; L2V - Câmara Macrogotas com filtro, conexão valvulada, regulador de fluxo e entrada de ar.

### Indicação de Uso:

O Equipos para infusão de uso único é utilizado na administração de soluções intravenosa em ambiente hospitalar, clínicas ou unidades de saúde por profissional devidamente habilitado.

### Instrução de uso:

1. Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de abertura.
2. Verificar a data de validade do produto.
3. Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.
4. Instalar equipos para infusão de uso único no paciente seguido os procedimentos padronizados da unidade de saúde.
5. **Não re-esterilizar e não reutilizar. O seu reprocessamento é proibido.**

### Conservação, Armazenamento e Transporte:

- **Condições de armazenamento:** armazenar a temperatura ambiente em local fresco e seco.
- **Condições de transporte:** transportar a temperatura ambiente em local fresco e seco.
- **Condições de manipulação:** manipular a temperatura ambiente em local fresco e seco.

### Advertência/Precaução:

- **Advertências:**  
O fabricante recomenda o uso único. Reprocessamento proibido.
- **Precauções:**
  1. Não utilizar se a embalagem apresentar sinais de danos ou estiver aberta.
  2. Não utilizar após a data de validade do produto.

### Validade:

**Prazo de validade:** 5 anos.

### Contraindicação:

Não se aplica desde que utilizado de acordo com as instruções de uso.

### Importado e Distribuído:

#### Importador:

**Matriz:** Labor Import Com. Imp. Exp. Ltda.

Rua Padre Damaso, 173,165 e 187 - CEP: 06016-010 - Osasco - SP

**CNPJ:** 01.005.728/0001-79

**Filial:** CNPJ: 01.005.728/0011-40

**SAC:** 0800 6658007

**Resp. Técnica:** Luciana J Lanzillo – CRF/SP: 41067

#### Fabricante:

**Shandong Weigao Group Medical Polymer Co. Ltd**

312, Shichang Road

Weihai City

Shandong Province

República Popular da China.