

FILME TRANSPARENTE EM ROLO WOUND CARE F

Modelo comercial: com variações de largura e comprimento.

Indicação de uso: Fixação e cobertura de curativos primários, cobertura de suturas, fixação de tubos, drenos e bolsas de perna, proteção de proeminências ósseas (calcâneo, cotovelo, joelho, região sacra, trocanteriana), Indicado para cobertura protetora da pele, proteção de tatuagens (usar somente depois do fim da fase exsudativa).

Composição: Filme: 100% poliuretano, revestido por um adesivo de poliacrilato hipoalergênico; Filme de suporte: 100% poliéster, revestido com polietileno e silicone; Papel de cobertura: 100% papel siliconado; Tiras adesivas: filme 100% poliéster e adesivo de poliacrilato.

Instrução de uso:

1. Antes de aplicar o filme, verificar se a pele está limpa e seca, livre de resíduos e oleosidades.
2. Cortar na dimensão adequada;
3. Remover o papel de proteção (planimetria) do filme. O lado do filme que ficará próximo à pele é o que está coberto com esse papel de proteção;
4. Aplique de forma firme a película do Filme Transparente em Rolo Wound Care F sobre a área desejada. Garanta uma fixação segura nas margens;
5. Após o filme completamente aplicado, remover o auxiliar de aplicação conforme as setas indicativas;
6. Para remoção, esticar o filme paralelamente à pele.

Advertências / Precauções: O descarte deve obedecer às normas de lixo hospitalar. Caso os pacientes possuam pele frágil e/ou sensível aplicar e remover delicadamente o filme. Em caso de irritação (reação alérgica) ou qualquer outro efeito adverso durante o uso do produto, deve-se suspender a utilização imediatamente e procurar orientação médica. Não esticar o filme demasiadamente no momento da aplicação para não exercer muita pressão sobre a pele, evitando traumatizar o local da lesão.

Contraindicações:

O Filme Transparente em Rolo Wound Care F não é indicado para feridas infectadas, feridas

profundas e feridas com muito exsudato

Armazenamento: O produto deve ser armazenado e transportado em ambiente fresco, sem umidade e protegido da luz, mantendo-o em sua embalagem original.

Contém: 01 unidade por embalagem primária.

Produto não estéril

Validade: 05 anos.

Fabricado por: Shanghai ISO Medical Products Co. Ltd.

Importado por: Polar Fix Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares Ltda.

Rua Ruzzi, 607 – Bairro Sertãozinho – Mauá/SP

CEP: 09370-850 – CNPJ: 02.881.877/0001-64 - Indústria Brasileira

Atendimento ao consumidor: 0800 191099 – sac@polarfix.com.br

Responsável Técnica: Leila M. Leal S. Barros – CRF/SP 49.339

www.polarfix.com.br